

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

Mode d'emploi Solution multifonctions ReNu[®] MultiPlus Fresh Lens Comfort

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET LA
CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

INSTRUCTIONS: Pour nettoyer, décontaminer et éliminer les dépôts de protéines de vos lentilles de contact quotidiennement, suivez les étapes simples ci-dessous:

ETAPE 1: Versez au moins 3 gouttes de ReNu MultiPlus solution multifonctions sur chaque face de la lentille et massez délicatement chaque face pendant 20 secondes.

ETAPE 2: Rincez soigneusement chaque face de la lentille pendant 5 secondes avec ReNu MultiPlus solution multifonctions.

ETAPE 3: Placez la lentille de contact nettoyée dans son étui. Remplissez cet étui de solution fraîche ReNu MultiPlus solution multifonctions. Laissez tremper pendant au moins 4 heures. N'oubliez pas de toujours utiliser de la solution fraîche.

Vos lentilles de contact sont désormais prêtes à être portées. Aucune solution saline n'est nécessaire. Si des débris restent à la surface des lentilles, rincez à nouveau avec ReNu MultiPlus solution multifonctions avant de poser vos lentilles sur les yeux.

Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Sur la base de votre qualité de larmes et de votre modalité de port, votre spécialiste peut recommander des produits et des traitements additionnels.

CONSERVATION: Vous pouvez conserver vos lentilles au maximum 30 jours dans un étui à lentilles fermé.

COMPOSITION: Solution stérile isotonique qui contient de l'HYDRANATE[®] (hydroxyalkylphosphonate) 0.03%, de l'acide borique, de l'édétate de sodium, de la poloxamine à 1%, du borate de sodium et du chlorure de sodium; conservée avec du DYMED[®] (polyaminopropyl biguanide) à 0,0001%.

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

ACTION:

Nettoie, et élimine les protéines, les autres dépôts et débris qui s'accumulent sur les lentilles de contact souples. Élimine les micro-organismes nuisibles de la surface des lentilles. Rince, conserve et réhydrate les lentilles avant la pose.

INDICATIONS (Utilisation): BAUSCH + LOMB ReNu Multiplus solution multifonctions est indiqué pour le nettoyage quotidien, l'élimination des dépôts de protéines, le rinçage, la décontamination chimique (et non thermique) et la conservation des lentilles de contact souples, conformément aux recommandations de votre spécialiste.

CONTRE-INDICATIONS (Raisons de ne pas utiliser ce produit):

Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergiques à l'un de ces composants.
AVERTISSEMENT: L'UTILISATION DES LENTILLES DE CONTACT ET DES SOLUTIONS D'ENTRETIEN PEUT CAUSER DES PROBLÈMES OCULAIRES GRAVES TELS UNE INFECTION ET/OU UN ULCÈRE CORNÉEN SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UNE PERTE DE LA VISION. Il est essentiel de suivre toutes les instructions d'utilisation spécifiées sur l'étiquetage et qui régissent le bon usage des lentilles, des solutions d'entretien ainsi que de l'étui pour lentilles. Les problèmes oculaires graves dont l'ulcère cornéen peuvent se développer rapidement et sont susceptibles d'entraîner une perte de la vision. Les lentilles à port journalier ne sont pas indiquées pour un port nocturne et ne doivent donc pas être portées pendant le temps de sommeil. Les études cliniques ont montré que le risque d'événements indésirables graves était augmenté quand les lentilles sont portées durant la nuit. Les lentilles à port prolongé doivent être régulièrement retirées de vos yeux pour être nettoyées, décontaminées ou jetées et remplacées, selon la fréquence recommandée par votre spécialiste. Les études cliniques ont montré que la fréquence d'événements chez ceux à port journalier. Les études ont également montré que plus longue était la période de port continu avant de retirer les lentilles pour les nettoyer, les décontaminer ou les jeter pour renouvellement, plus élevé était le risque d'événements indésirables graves. Ce risque est également plus important chez les fumeurs. Si vous ressentez une gêne oculaire, manifestez un larmoiement excessif, des troubles de la vision ou une rougeur des yeux, retirez immédiatement vos lentilles et contactez votre spécialiste au plus vite. Il est recommandé de consulter votre spécialiste deux fois par an ou plus si nécessaire.

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

Vous devez toujours remplir votre étui à lentilles avec de la solution fraîche pour conserver vos lentilles et ne jamais réutiliser de la solution usagée. Vous devez jeter la solution restante dans l'étui immédiatement après avoir sorti les lentilles de l'étui. Vous ne devez pas conserver vos lentilles dans de l'eau, ni les exposer à l'eau, ni rincer votre étui avec de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, de l'eau distillée ou avec une solution non stérile.

Videz puis nettoyez votre étui à lentilles avec ReNu MultiPlus solution multifonctions. Toujours séchez votre étui à l'air libre chaque fois que vous retirez vos lentilles. Pour vider complètement votre étui de la solution, vous pouvez le retourner d'un coup sec pendant le séchage à l'air libre. Remplacez votre étui à lentilles tous les 30 jours.

Mise en garde: Si vous ne jetez pas la solution usagée de l'étui après chaque trempage ou si vous utilisez de l'eau pour nettoyer vos lentilles, une contamination pourrait se produire provoquant une lésion oculaire et une perte de vision potentielle. Pour des informations supplémentaires sur la sécurité d'emploi, référez-vous aux recommandations d'utilisation.

PRECAUTIONS:

- Suivez toujours les recommandations d'utilisation. Le non-respect de ces instructions est susceptible de causer une perte de la vision.
- Consultez régulièrement votre spécialiste.
- Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute manipulation de lentilles.
- Ne pas utiliser d'eau du robinet, ni d'eau en bouteille, ni de salive avec les lentilles ou l'étui à lentilles.
- Utilisez uniquement de la solution fraîche pour nettoyer et décontaminer vos lentilles.
- Jetez toujours la solution restante dans l'étui à lentilles après chaque cycle de décontamination.
- Une solution saline ou des gouttes de confort ne décontamineront pas vos lentilles.
- Remplacez toujours votre solution et vos lentilles en suivant les instructions.
- Remplacez toujours votre étui à lentilles mensuellement.
- Pour éviter toute contamination, évitez tout contact de l'embout du flacon avec une surface quelconque. Refermez bien le bouchon après utilisation.

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

- Ne pas utiliser de façon concomitante avec un collyre sauf sous stricte surveillance médicale.
- Ne doit pas être utilisé avec un système de décontamination thermique
- Gardez le flacon bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la solution avant la date de péremption indiquée sur le carton et le flacon.
- Utilisez la solution jusqu'à 90 jours après la première ouverture.
- Tenir le produit hors de portée des enfants
- Conserver le flacon à température ambiante

IMPORTANT: Si une irritation ou un larmoiement apparaissent, persistent ou s'aggravent ou si votre vision est affectée, retirez vos lentilles et consultez rapidement un spécialiste.

®/™ sont des marques déposées de Bausch & Lomb Incorporated ou ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated.