



## **Bausch + Lomb Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO®**

**LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**

Beste gebruiker,

Hartelijk dank om voor Biotrue® bevochtigende oogdruppels MDO® te kiezen! Dit product is ideaal voor onmiddellijke verlichting en voor bevochtiging van uw ogen bij droge ogen veroorzaakt door externe factoren. Het verfrist en bevochtigt het oog op natuurlijke wijze, en verzacht de symptomen van vermoeide, geïrriteerde en tranende ogen. Met het innovatieve multi-doseringsstelsel zonder conserveringsmiddelen (MDO®) biedt Biotrue® alle voordelen van een vloeistof zonder conserveringsmiddelen in een multi-doseringsfles. Het is het natuurlijke beetje verfrissing dat direct bevochtiging biedt aan ogen die dagelijks intensief belast worden door externe factoren.

- Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn een kristalheldere oogdruppel vloeistof
- Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn vrij van conserveringsmiddelen
- Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® kunnen na opening 6 maanden worden gebruikt
- Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® bevatten het natuurlijke polymeer hyaluronzuur (als natriumhyaluronaat), dat ook in de natuurlijke traanfilm voorkomt.
- Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn geschikt voor het bevochtigen en opnieuw bevochtigen van zachte en harde contactlenzen tijdens het dragen, en verbetert aanzienlijk het comfort van uw contactlenzen, gedurende de gehele dag
- Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn eenvoudig te gebruiken, worden goed verdragen en zijn veilig in gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door – deze bevat belangrijke informatie over hoe u dit product moet gebruiken. Als u vragen heeft, vraag dan advies aan uw opticien of contactlensspecialist. Bausch+Lomb wenst u en uw ogen het allerbeste toe!

**SAMENSTELLING:** De vloeistof bevat 0,24% hyaluronzuur (als natriumhyaluronaat), steriel water, natriumchloride, kaliumchloride, dinatriumfosfaat dodecahydraat en natrium dihydrogeenfosfaatdihydraat. Het is vrij van conserveringsmiddelen.



**VERPAKKING:** Biotrue® Oogdruppels MDO® zijn verkrijgbaar in een flesje van 10 ml.

**INDICATIES (VOOR GEBRUIK):** Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® lubrificeren het oog en zijn geschikt voor het bevochtigen en opnieuw bevochtigen van zachte en harde contactlenzen tijdens het dragen. Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn geschikt voor het verfrissen en bevochtigen van droge ogen die worden veroorzaakt door externe omgevingsfactoren. Deze factoren worden vaak beïnvloed door de levensstijl en de omgeving, waaronder langdurig computergebruik, ruimtes met airconditioning, weinig knippen, sigarettenrook en winderige omgevingen. Bovendien kunnen bepaalde medicijnen (zoals de anticonceptiepil, antihistaminica, bètablokkers, antispasmodica en diuretica), bepaalde ziekten of conserveringsmiddelen aanwezig in bepaalde oogdruppels, een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van droge ogen. Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® hydrateren om belangrijke symptomen van droge ogen te verlichten, zoals het gevoel van droogheid, irritatie of vermoeide ogen, het gevoel dat er iets in het oog zit of overmatig tranende ogen. Gezien de eigenschappen van dit product kunnen consumenten met chronisch droge ogen ook baat hebben bij het gebruik ervan.

**HOE VAAK MOET U BIOTRUE® BEVOCHTIGENDE OOGDRUPPELS MDO®**

**GEBRUIKEN:** Breng één druppel aan in het oog. Aangezien Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® geen conserveringsmiddel bevatten, kunt u het iedere dag gebruiken, zo vaak als u wilt.

**BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN BIOTRUE®**

**BEVOCHTIGENDE OOGDRUPPELS MDO®:** In uitzonderlijke gevallen kan dit product overgevoeligheidsreacties veroorzaken, zoals plaatselijke, allergische reacties. In deze gevallen moet de behandeling worden gestopt.

Het product niet gebruiken, als u overgevoelig bent voor één van de ingrediënten.

Veiligheidsinformatie voor gebruikers die lijden aan ernstige letsels van het hoornvlies: in uitzonderlijke gevallen werden afzettingen van calciumfosfaat op het hoornvlies gezien, tijdens een behandeling met geneesmiddelen voor het oog die fosfaten bevatten.


Om de verdraagzaamheid te vergroten bevatten Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® geen conserveringsmiddel. Dankzij het pompmechanisme kunt u de druppels gedurende 24 weken (6 maanden) na opening gebruiken. Biotrue® Bevochtigende

oogdruppels MDO® niet gebruiken na de vervaldatum.

Niet gebruiken als het flesje beschadigd is.

Opmerking: bij eerste gebruik of na een periode van niet-gebruik is het nodig het pompmechanisme te enkele malen in te drukken. Als u de vloeistof pompt, moet u het flesje naar beneden gericht houden.

**ZO GEBRUIKT U BIOTRUE® BEVOCHTIGENDE OOGDRUPPELS MDO®:** Het gepatenteerde pompmechanisme laat toe dat de vloeistof vrij van conserveringsmiddelen is, maar het lijkt mogelijk niet op de druppelflesjes die u in het verleden hebt gebruikt. De illustraties laten het eenvoudige en gemakkelijke gebruik zien van Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO®.

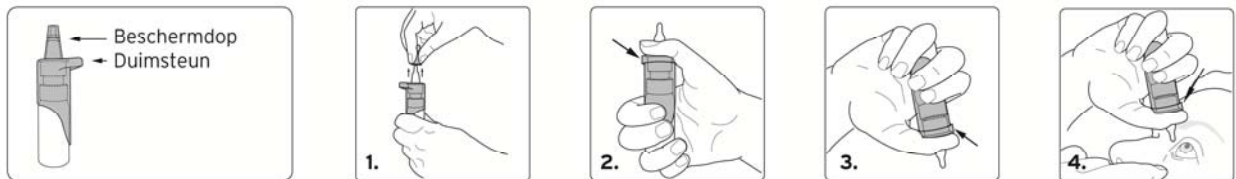

1. Verwijder de beschermdop van de punt van de fles voor ieder gebruik. Zorg ervoor dat de punt van de fles uw vingers niet aanraakt.
2. Plaats uw duim op de ergonomische duimsteun en twee andere vingers op de onderkant van de fles.
3. Draai de fles om en houd hem zoals wordt getoond. Voordat u de pomp voor de eerste keer gebruikt, moet u hem klaarmaken voor gebruik. Dit doet u door ongeveer zeven keer op de duimsteun te drukken totdat de eerste druppel verschijnt.
4. Houd uw hoofd een beetje achterover en houd de fles op een voor u handige manier boven uw ogen om de druppel aan te brengen. Trek voorzichtig uw onderste ooglid omlaag met een vinger van uw vrije hand, houd de fles in verticale positie en druk voorzichtig op de duimsteun om één druppel in het oog aan te brengen. Sluit daarna uw oog en beweeg het langzaam heen en weer om de druppel optimaal over het oppervlak van uw oog te verspreiden. U kunt uw andere hand gebruiken voor extra ondersteuning en nauwkeurigheid als u denkt dit nodig te hebben.
5. Vermijd contact van de punt van de fles met uw ogen of uw vingers om mogelijke besmetting van de vloeistof te voorkomen.
6. Plaats de beschermdop terug op de punt van de fles onmiddellijk na het gebruik.

CE 0483



Dr. Gerhard Mann  
Chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin, Germany

Distributeur:  
Bausch+Lomb OPS B.V.  
Postbus 75774  
1118 ZX Luchthaven Schiphol  
Nederland



Bewaar dit middel tussen +1 °C en +25 °C



Niet gebruiken als het flesje beschadigd is.



Vervaldatum



Lees de gebruiksaanwijzing!



Het product 6 maanden na opening weggooien.



Lotnummer



Sterilisatiemethode, aseptisch