



Catalogue produits Belgique / Luxembourg

Lentilles de contact et
solutions d'entretien

2026

BAUSCH+LOMB

Allez au-delà de la vision

Depuis plus de 170 ans, Bausch + Lomb se consacre exclusivement à l'amélioration et à la protection de la vision de millions de personnes dans le monde. Depuis leur naissance en passant par chaque étape de la vie.

En tant qu'une des marques de soins oculaires les plus réputées et les plus respectées au monde, nous avons la responsabilité de répondre aux besoins des clients, des patients et des professionnels de la vue. Et ce, en mettant résolument l'accent sur l'innovation, la qualité et l'expertise professionnelle.

Notre mission est simple mais forte :

Mieux voir. Mieux vivre.

Avec vous, nous tirons le meilleur parti des yeux de vos clients !

Le catalogue est désormais également disponible en version numérique :



www.bausch-lomb.be/fr

Sommaire

LENTILLES DE CONTACT

Lentilles de contact journalières

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY	5
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY Multifocal	6
Biotrue® ONEday	7
Biotrue® ONEday for Astigmatism	9
Biotrue® ONEday for Presbyopia	10
SofLens® Daily Disposable	11

Lentilles de contact mensuelles

Bausch + Lomb ULTRA®	13
Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism	15
Bausch + Lomb ULTRA® for Presbyopia	16
Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism	17
PureVision®2	19
PureVision®2 for Astigmatism	20
PureVision®2 for Presbyopia	21
SofLens®	23
SofLens® 59	24
SofLens® Toric for Astigmatism	25
SofLens® Multi-Focal	26
SofLens® 38	27
Starterkits, Lentilles d'essai et modes d'emploi	29
Academy of Vision Care	30

ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT

Solutions d'entretien pour lentilles de contact souples

Biotrue® Multi-Purpose Solution	32
Biotrue® Nourish	33
ReNu® ADVANCED Multi-Purpose Solution	34
ReNu® MultiPlus Multi-Purpose Solution	35
ReNu® MPS Multi-Purpose Solution	36
EasySept® Solution oxydante	37

Solutions d'entretien pour lentilles de contact rigides

Boston® ADVANCE™ Cleaner	38
Boston® Conditioning Solution	39
Bausch + Lomb Concentrated Cleaner	40
Bausch + Lomb Conditioning Solution	41
Boston® SIMPLUS®	42

Sujets divers

Tableau de conversion	44
Guides d'adaptation pour lentilles de contact souples	46
Guides d'adaptation pour lentilles de contact souples multifocales	49
Optimisation de la vision avec des lentilles multifocales	50
Professional Relations & Marketing	53
Programme Recyclens	54
Application FitBetter™	55
Commandes et facturation	56
Conditions, frais d'expédition et règles principales retours & crédits	57
Faites connaissance avec l'équipe de vente Bausch + Lomb	58
Références	60

Bausch + Lomb ULTRA[®] ONE DAY

LA LENTILLE LA PLUS COMPLÈTE¹
Santé • Confort • Hydratation • Vision



La lentille journalière en silicone hydrogel Bausch + Lomb ULTRA[®] ONE DAY bénéficie d'un design complet qui combine deux technologies de pointe, offrant une hydratation et un confort optimisés, pour une toute nouvelle expérience de port en lentilles de contact.¹

16 heures de confort

L' Advanced MoistureSeal[®] Technology et la ComfortFeel Technology agissent en synergie pour procurer un confort optimal pendant 16 heures.^{2,3}

Favorise un environnement oculaire stable et sain

La ComfortFeel Technology libère pendant le port des agents qui favorisent le confort et la santé oculaire en aidant à protéger, enrichir et stabiliser le film lacrymal.^{2,4}

Une hydrophilie et une rétention d'eau supérieures*

L' Advanced MoistureSeal[®] Technology offre une hydrophilie de 55% et 96% de rétention d'eau pour un port confortable longue durée.^{5,6,7,8}

Haute transmission de l'oxygène pour des yeux blancs et sains

134 Dk/t @ -3.00D.²

Optique haute définition**

Contrôle de l'aberration sphérique pour une vision claire, même lors de la conduite dans l'obscurité et réduction des halos et des reflets, en particulier en cas de mauvaises conditions d'éclairage.³

Bausch + Lomb ULTRA[®] ONE DAY



Faible modulus* pour une souplesse révolutionnaire

0.5MPa^{9,10,11}

Filtre UV

Filtre au moins 95% des rayons UV-B et au moins 50% des rayons UV-A.⁶

Manipulation facile

Facile à mettre et à enlever.³

Adaptation universelle

Un seul rayon de courbure, un seul diamètre pour une adaptation facile.³

Paramètres

Matériau :	Kalifilcon A
Technologie :	Advanced MoistureSeal [®] Technology + ComfortFeel Technology
Design lentille :	L'optique haute définition réduit l'aberration sphérique inhérente et induite
Hydrophilie :	55%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.2 mm
Gamme des puissances :	-0.25D à -6.00D (par 0.25D) -6.50D à -12.00D (par 0.50D) +0.25D à +6.00D (par 0.25D)
Épaisseur centrale :	0.08 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	134 Dk/t (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Oui (Classe II)
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Journalier
Modulus :	0.5 MPa
Conditionnement :	30-pack en 90-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter[™] page 55

BAUSCH + LOMB

*vs. Dailies Total 1[®] and Acuvue[®] Oasys 1-Day contact lenses.

Bausch + Lomb ULTRA[®] ONE DAY Multifocal

Disponible
à partir de
Mars 2026



3-Zone Progressive Design™

Pour une vision sans transitions et nette, de près, de loin et à toutes les distances intermédiaires.²⁴

Adaptation rapide

Seulement deux additions pour une adaptation rapide et facile.

Manipulation facile

Facile à mettre et à enlever.³

Filtre UV

Filtre au moins 95% des rayons UV-B et au moins 50% des rayons UVA.⁶

Paramètres

Matériau :	Kalifilcon A
Technologie :	Advanced MoistureSeal [®] Technology + ComfortFeel Technology
Design :	3-Zone Progressive™ Design
Hydrophilie :	55%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.2 mm
Gamme des puissances :	+6.00D à -10.00D (par 0.25D)
Additions :	Low: +0.75D à +1.50D addition lunettes High: +1.75D à +2.50D addition lunettes
Epaisseur centrale :	0.08 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	134 Dk/t (@-3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Oui (Classe II)
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Journalier
Modulus :	0.5 MPa
Conditionnement :	30-pack et 90-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55



Guide
d'adaptation
page 49

Biotrue® ONEday



HYDRATATION MAXIMALE*, CONFORT MAXIMAL*^{12,13}

Bausch + Lomb Biotrue® ONEday est une lentille journalière en hydrogel à hydrophilie élevée qui utilise la technologie révolutionnaire Surface Active®. Cette technologie préserve presque 100% de la teneur en eau pendant 16 heures. Elle offre une grande stabilité du film lacrymal et un confort maximal pour le porteur de lentilles de contact.^{**12,13,14,15,16}

* Based on ACLM Year book. 2019. ** Compared to Nelfilcon A and Etafilcon A. *** Non valable pour les Presbytes. **** UV-absorbing contact lenses are NOT substitutes for UV-absorbing sunglasses. You should continue to use UV absorbing sunglasses as directed.

Hydratation maximale*, confort maximal**

Contient 78% d'eau, comme la cornée, et maintient presque 100% de sa teneur en eau pendant 16h pour un confort exceptionnel du matin au soir.^{12,13,15,17}

Surface Active Technology®

Le PVP, un polymère hydrophile, assure l'hydrophilie élevée de la lentille. Le Poloxamer 407 augmente la rétention d'eau en formant une barrière brevetée contre la déshydratation.^{15,18}

Contribue au maintien d'un film lacrymal stable

Meilleure stabilité du film lacrymal après 10h de port des lentilles.¹⁶

Excellente transmissibilité à l'oxygène

Fournit à l'œil ouvert davantage d'oxygène que ce dont il a besoin pour rester en bonne santé et blanc.^{12,19}

Optique asphérique***


Contrôle les aberrations sphériques pour une vision claire tout au long de la journée, réduisant les halos, surtout en cas de mauvaises conditions d'éclairage.¹³

Protection UV-A / UV-B

Filtre plus de 50% des rayons UV-A nocifs et plus de 95% des rayons UV-B.^{20****}

BAUSCH+LOMB

Biotrue® ONEday

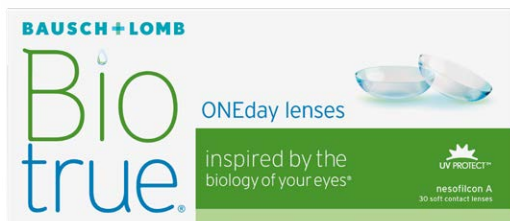

Optique asphérique

Contrôle les aberrations sphériques pour une vision claire tout au long de la journée, réduisant les halos, surtout lors de la conduite de nuit.¹³

Paramètres

Matériau :	Nesofilcon A
Hydrophilie :	78%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.2 mm
Gamme des puissances :	-0.25D à -6.25D (par 0.25) -6.50D à -12.00D (par 0.50) +0.25D à +6.00D (par 0.25)
Épaisseur centrale :	0.1 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	42 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Oui
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Journalier
Modulus :	0.49 MPa
Conditionnement :	30-pack et 90-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

Biotrue® ONEday for Astigmatism



Design péri-ballast

Design péri-ballast avancé, inspiré par le clignement des paupières, sans prisme, pour une vision toujours claire et stable.^{21,22}

Contrôle de l'aberration sphérique

Optimisé dans les deux méridiens pour une vision nette et une réduction des halos et des reflets.^{21,23}

Design des bords effilé

Minimise l'interaction avec la paupière.²²

Indicateur de l'axe et trait repère d'orientation

Indicateur de stabilité de la rotation, simplification de l'insertion des lentilles.²¹

Paramètres

Matériau :	Nesofilcon A	
Hydrophilie :	78%	
Rayon de courbure :	8.4 mm	
Diamètre :	14.5 mm	
Gamme des puissances :	Cylindres	Axes
Plan à -6.00 (par 0.25)	-0.75D, -1.25D, -1.75D	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°
	-2.25D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	-2.75D (par 0.50D)	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
-6.50D à -9.00D (par 0.50)	-0.75D, -1.25D, -1.75D	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
	-2.25D	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0.25D à +4.00D (par 0.25)	-0.75D, -1.25D, -1.75D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	-2.25D	10°, 20°, 80°, 90°, 100°, 160°, 170°, 180°
Epaisseur centrale :	0.1 mm @ -3.00D	
Transmission de l'oxygène :	42 (@-3.00D)	
Teinte de manipulation :	Bleu clair	
Filtre UV :	Oui	
Modalité :	Port quotidien	
Schéma de port :	Journalier	
Modulus :	0.49 MPa	
Conditionnement :	30-pack et 90-pack (90-pack: uniquement les orientations d'axe en gras)	



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

BAUSCH+LOMB

Biotrue® ONEday for Presbyopia



Design 3-Zone Progressive™

Pour une vision sans transitions et nette, de près, de loin et à toutes les distances intermédiaires.²⁴

Adaptation rapide

Seulement deux additions pour une adaptation facile et rapide.

Paramètres

Matériau :	Nesofilcon A
Hydrophilie :	78%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.2 mm
Gamme des puissances :	+6.00D à -9.00D (par 0.25)
Additions :	Low: +0.75D à +1.50D addition lunettes High: +1.75D à +2.50D addition lunettes
Épaisseur centrale :	0.1 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	42 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Oui
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Journalier
Modulus :	0.49 MPa
Conditionnement :	30-pack et 90-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55



Guide
d'adaptation
page 49

SofLens® Daily Disposable



VISION CLAIRE ET COMMODITÉ À UN PRIX AVANTAGEUX²⁵

SofLens® Daily Disposable est une lentille journalière en hydrogel offrant confort et vision nette à un excellent rapport qualité-prix.²⁵

ComfortMoist™ Technology


Pour un confort qui dure tout au long de la journée.²⁵

Optique asphérique

Contrôle des aberrations sphériques pour une vision nette et précise tout au long de la journée, réduction des halos et éblouissements en cas de faible luminosité.^{25,26}



SofLens® Daily Disposable

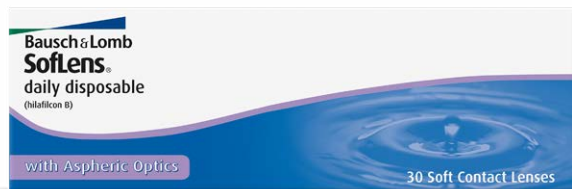

Optique asphérique

Contrôle des aberrations sphériques pour une vision nette et précise tout au long de la journée, réduction des halos et éblouissements en cas de faible luminosité.^{25,26}

Paramètres

Matériau :	Hilafilcon B
Hydrophilie :	59%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.2 mm
Gamme des puissances :	+6.50D à -6.50D (par 0.25) -7.00D à -9.00D (par 0.50)
Épaisseur centrale :	0.09 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	24 (@-3.00D)
Téinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Journalier
Conditionnement :	30-pack et 90-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise:
Application
FitBetter™ page 55

BAUSCH + LOMB ULTRA®



CONFORT ET PERFORMANCES VISUELLES EXCEPTIONNELLES TOUT AU LONG DU MOIS²⁹

Bausch + Lomb ULTRA® est une lentille mensuelle en silicone hydrogel de haute qualité dotée de la technologie MoistureSeal® qui permet de maintenir 95% de son hydratation durant 16 heures, pour un confort et une vision longue durée.^{30,31,32}

Confort exceptionnel pendant 16 heures

Aussi confortable en fin de journée qu'en début de journée.³⁰

Rétention de l'hydratation longue durée

Pour un confort de port et une qualité optique inégalée.^{30,32}

Excellente perméabilité à l'oxygène

Pour maintenir les yeux blancs et sains.³²

Optique Haute Définition*

Contrôle des aberrations sphériques pour une vision nette et précise ainsi qu'une réduction des halos et éblouissements, même en cas de faible luminosité.³⁰

Port prolongé

Peut être portée pendant 7 jours et 6 nuits sans retrait, en respectant le schéma de remplacement mensuel.**

* Non valable pour les Presbytes et Presbytes Astigmatiques. **BAUSCH + LOMB ULTRA® contact lenses are indicated for daily wear or extended wear of up to seven days. Meaning that you can wear the lenses for 6 nights, 7 days without removing them. On the 7th day the lenses should be removed and cleaned/disinfected for one night. The following morning, the same lenses can be reinserted for another 7 days. This can be repeated for 30 days at which time the lenses should be discarded. As with any contact lens, problems can result in serious injury to the eye, including loss of vision, and clinical studies have shown that the risk of serious adverse reactions is increased when lenses are worn overnight. It is essential that patients follow the eye care practitioner's direction and all labeling instructions for proper use of lenses and lens care products. Consult the package insert for complete information.

BAUSCH + LOMB ULTRA[®]



Optique Haute Définition

Contrôle des aberrations sphériques pour une vision nette et précise ainsi qu'une réduction des halos et éblouissements, même en cas de faible luminosité.³⁰

Paramètres

Matériau :		Samfilcon A
Hydrophilie :		46%
Rayon de courbure :		8.5 et 8.7 mm
Diamètre :		14.2 mm
Gamme des puissances :	8.5 mm	-12.00D à -6.50D (par 0.50) -6.00D à +6.00D (par 0.25)
	8.7 mm	-12.00D à -6.50D (par 0.50) -6.00D à -0.25D (par 0.25) +0.25D à +3.00D (par 0.25)
Épaisseur centrale :		0.07 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :		163 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :		Bleu clair
Filtre UV :		Non
Modalité :		Port quotidien, port prolongé jusqu'à 7 jours
Schéma de port :		Mensuel
Modulus :		0.69 MPa
Conditionnement :		6-pack



Mode d'emploi
page 29




La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55



Guide
d'adaptation
page 48

BAUSCH + LOMB ULTRA[®] for Astigmatism

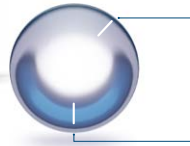

Vision stable et toujours claire

OpticAlign™ Design, conception optimisée du ballast, rotation lors de l'adaptation $\leq 5^\circ$ pour 94 % des porteurs.³³

Contrôle de l'aberration sphérique

Optimisé sur les deux axes pour une vision nette et précise et une réduction des halos et éblouissements.^{33,34,35}

Design des bords effilé

Minimise les interactions avec la paupière.³⁴

Indicateur de l'axe et trait repère d'orientation

Contribue à évaluer la stabilité de la rotation et facilite l'insertion de la lentille.³⁶

Paramètres

Matériau :			Samfilcon A
Hydrophilie :			46%
Rayon de courbure :			8.6 mm
Diamètre :			14.5 mm
Puissances sphériques	Cylindres	Axes	
+6.00D à -6.00D (par 0.25)	-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D,	10° - 180° (par 10°)	
-6.50D à -9.00D (par 0.50)	-2.75D		
Épaisseur centrale :			0.10 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :			114 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :			Bleu clair
Filtre UV :			Non
Modalité :			Port quotidien, port prolongé jusqu'à 7 jours
Schéma de port :			Mensuel
Modulus :			0.69 MPa
Conditionnement :			6-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

BAUSCH + LOMB ULTRA[®] for Presbyopia



Design 3-Zone Progressive[™]

Pour une vision sans transitions et nette, de près, de loin et à toutes les distances intermédiaires.³⁷

Adaptation facile

Seulement deux additions pour une adaptation facile et rapide.

Gamme des puissances complète, par 0,25D

Paramètres

Matériau :	Samfilcon A
Hydrophilie :	46%
Rayon de courbure :	8.5 mm
Diamètre :	14.2 mm
Puissances sphériques	+6.00D à -10.00D (0.00 incl., par 0.25D)
Additions :	Low: +0.75D à +1.50D addition lunettes High: +1.75D à +2.50D addition lunettes
Épaisseur centrale :	0.07 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	163 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien, port prolongé jusqu'à 7 jours
Schéma de port :	Mensuel
Modulus :	0.69 MPa
Conditionnement :	6-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise:
Application
FitBetter[™] page 55



Guide
d'adaptation
page 49

BAUSCH + LOMB ULTRA[®] Multifocal for Astigmatism



Sans transitions

Design 3-Zone Progressive™, pour une vision sans transitions, de près, de loin et à toutes les distances intermédiaires.

Stable

OpticAlign™ Design : $\leq 5^\circ$ de rotation pour 95 % des porteurs.³⁸

Simple

Facile à adapter. 6068 combinaisons de paramètres uniques en stock et prêtes à être expédiées.³⁸

Paramètres

Matériau :		Samfilcon A
Hydrophilie :		46%
Rayon de courbure :		8.6 mm
Diamètre :		14.5 mm
Puissances sphériques	Cylindres	Axes
+4.00D à -6.00D (par 0,25D)	-0.75D, -1,25D, -1,75D	10° à 180° (par 0°)
	-2.25D, -2,75D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Additions :		Low : +0.75D à +1.50D addition lunettes High : +1.75D à +2.50D addition lunettes
Épaisseur centrale :		0,11mm@-3.00D
Transmission de l'oxygène :		104 (@-3.00D)
Teinte de manipulation :		Bleu clair
Filtre UV :		Non
Modalité :		Port quotidien, port prolongé jusqu'à 7 jours
Schéma de port :		Mensuel
Modulus :		0.69 MPa
Conditionnement :		6-pack



Mode d'emploi
page 29



a conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55



Guide
d'adaptation
page 49

BAUSCH + LOMB

PureVision® 2



UNE VISION CLAIRE ET NETTE³⁹

PureVision® 2 est une lentille mensuelle en silicone hydrogel conçue pour une vision et un confort de port optimaux. Réduit les halos et les reflets, même en cas de faible luminosité.³⁹

Optique Haute Définition*

Contrôle des aberrations sphériques pour une vision nette et précise et une réduction des halos et éblouissements en conduite de nuit et faible luminosité.³⁹

Technologie ComfortMoist™

Des bords arrondis et un agent hydratant dans le blister pour un confort qui dure tout au long de la journée.^{39,40}


Transmissibilité à l'oxygène

Transmissibilité à l'oxygène élevée, pour des yeux sains et blancs.⁴¹

Port étendu

Peut être portée jusqu'à 30 jours sans interruption, en respectant le schéma de remplacement mensuel.

PureVision® 2

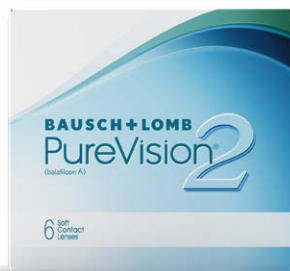

Optique Haute Définition

Contrôle des aberrations sphériques pour une vision nette et précise et une réduction des halos et éblouissements en cas de faible luminosité.³⁹

Paramètres

Matériau :	Balafilcon A
Hydrophilie :	36%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.0 mm
Gamme des puissances :	+6.00D à -6.00D (par 0.25) -6.50D à -12.00D (par 0.50)
Épaisseur centrale :	0.07 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	130 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien, port prolongé jusqu'à 30 jours
Schéma de port :	Mensuel
Conditionnement :	6-pack




Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

PureVision[®] 2 for Astigmatism

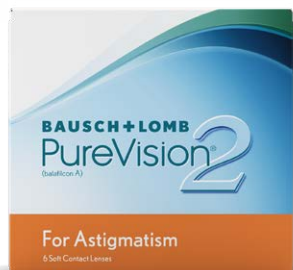

Design Auto Align™

Minimise la rotation de la lentille et assure une vision stable et constante tout au long de la journée.⁴²

Contrôle de l'aberration sphérique

Optimisé sur les deux axes pour une vision nette et précise et une réduction des halos et éblouissements.⁴²

Paramètres

Matériau :		Balafilcon A
Hydrophilie :		36%
Rayon de courbure :		8.9 mm
Diamètre :		14.5 mm
Puissances sphériques	Cylindres	Axes
Plan à -9.00D par 0.25D (à partir de -6.00 par 0.50D)	-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D	10°, 20°, 80°, 90°, 100°, 160°, 170°, 180°
Épaisseur centrale :		0.10 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :		91 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :		Bleu clair
Filtre UV :		Non
Modalité :		Port quotidien, port prolongé jusqu'à 30 jours
Schéma de port :		Mensuel
Conditionnement :		6-pack




Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

PureVision[®] 2 for Presbyopia

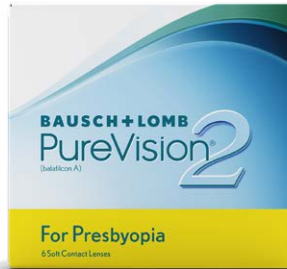

Design 3-Zone Progressive[™]

Pour une vision sans transitions et nette, de près, de loin et à toutes les distances intermédiaires.⁴³

Adaptation aisée

Seulement deux additions pour une adaptation aisée.

Paramètres

Matériau :	Balafilcon A
Hydrophilie :	36%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.0 mm
Puissances sphériques :	+6.00D à -10.00D (par 0.25)
Additions :	Low: +0.75D à +1.50D addition lunettes High: +1.75D à +2.50D addition lunettes
Epaisseur centrale :	0.07 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	130 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien, port prolongé jusqu'à 30 jours
Schéma de port :	Mensuel
Conditionnement :	6-Pack



Mode d'emploi
page 29




La conversion
la plus précise:
Application
FitBetter[™] page 55



Guide
d'adaptation
page 49

BAUSCH + LOMB

REPOUSSEZ LES LIMITES DU CONFORT¹

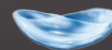

Live the **ULTRA** Life.

BAUSCH + LOMB

Références: 1. Only Bausch + Lomb ULTRA® ONEDAY contact lenses offer a complete moisture + comfort system with Advanced MoistureSeal® and ComfortFeel Technologies plus a complete design of high Dk/t, low modulus, UV blocking and High Definition™ Optics. Bausch + Lomb ULTRA® ONEDAY contact lenses deliver health through its complete system working together to support a healthy ocular environment, the inclusion of eye health ingredients which are retained over 16 hours and the high allowance of oxygen permeability (Dk/t=134). © 2021 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ indicate trademarks of Bausch & Lomb Incorporated. Other product and brand names are trademarks of their respective owners. Bausch + Lomb Pharma SA Avenue du Haras 156, B-1150 Bruxelles, e-mail: visioncare.belux@bausch.com Les lentilles de contact et les solutions d'entretien pour lentilles de contact de Bausch + Lomb sont des dispositifs médicaux. CE 00505158.

Famille SofLens®



LENTILLES CLASSIQUES & ABORDABLES

SofLens® est une famille de lentilles mensuelles en hydrogel qui offre confort et vision nette à un prix abordable.⁴⁶

SofLens® 59



Les lentilles SofLens® 59 conviennent parfaitement aux personnes qui recherchent une lentille offrant un bon rapport qualité-prix.

Ces lentilles sont fabriquées en matériau hydrogel de haute qualité, dont l'hydrophilie de 59% assure un bon confort de port.

Faciles à manipuler et à mettre.⁴⁶

Paramètres

Matériau :	Hilafilcon B
Hydrophilie :	59%
Rayon de courbure :	8.6 mm
Diamètre :	14.2 mm
Gamme des puissances :	+6.00D à +0.50D (par 0.25) -0.50D à -6.00D (par 0.25) -6.50D à -9.00D (par 0.50)
Épaisseur centrale :	0.14 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	22 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Mensuel
Conditionnement :	6-pack




Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

SofLens® Toric for Astigmatism

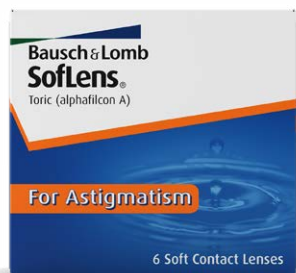

Design Lo-Torque™

Une combinaison de caractéristiques qui assurent une orientation et une stabilité constantes sur toute la gamme des puissances, pour une vision claire et stable.^{27,28}

Paramètres

Matériau :		Alphafilcon A
Hydrophilie :		66%
Rayon de courbure :		8.5 mm
Diamètre :		14.5 mm
Puissances sphériques	Cylindres	Axes
-0.25D à -6.00D (par 0.25)	-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D, -2.75D	10° - 180° (par 10°)
-6.50D à -9.00D (par 0.50)		
Épaisseur centrale :		0.195 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :		16 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :		Bleu clair
Filtre UV :		Non
Modalité :		Port quotidien
Schéma de port :		Mensuel
Conditionnement :		6-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise:
Application
FitBetter™ page 55

BAUSCH+LOMB

SofLens® Multi-Focal



Optique Natra-Sight™

Fournit un large corridor, de la vision de près à la vision de loin, pour une vision claire et naturelle.⁴⁷

Paramètres

Matériau :	Polymacon
Hydrophilie :	38.6%
Rayon de courbure :	8.5 mm et 8.8 mm
Diamètre :	14.5 mm
Puissances sphériques :	+6.00D à -7.00D (par 0.25)
Gamme des puissances :	Low: +0.75D à +1.50D addition lunettes High: +1.75D à +2.50D addition lunettes
Épaisseur centrale :	0.10 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	8.4 (@-3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Mensuel
Conditionnement :	6-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise:
Application
FitBetter™ page 55

SofLens® 38



Offre une vision claire et nette

Fabriquée en un matériau repoussant les salissures

Facile à manipuler et à mettre⁴⁶

Paramètres

Matériau :	Polymacon
Hydrophilie :	38.6%
Rayon de courbure :	8.4 mm, 8.7 mm et 9.0 mm
Diamètre :	14.0 mm
Gamme des puissances :	-0.25D à -5.00D (par 0.25) -5.50D à -9.00D (par 0.50)
Épaisseur centrale :	0.035 mm @ -3.00D
Transmission de l'oxygène :	24.3 (@ -3.00D)
Teinte de manipulation :	Bleu clair
Filtre UV :	Non
Modalité :	Port quotidien
Schéma de port :	Mensuel
Conditionnement :	6-pack



Mode d'emploi
page 29



La conversion
la plus précise :
Application
FitBetter™ page 55

BAUSCH + LOMB



Triple système de désinfection

La seule solution multifonctions dotée d'un triple système de désinfection.^{1,2,3,4}

Élimine 99,9% des microbes.^{5*}



Nettoyage avancé

Les deux tensioactifs nettoient, conditionnent et éliminent les résidus lacrymaux des lentilles de contact souples.

Utilisée quotidiennement, cette solution contribue à prévenir les dépôts sur les lentilles et à dissoudre les protéines.^{6,7,8}



Confort tout au long de la journée

Conditionne, hydrate et fournit 20 heures d'hydratation.^{9**}

Références: * Based on ISO 14729 testing against the 5 panel organisms. ** P-181 retention measured across 4 leading silicone hydrogels when worn for up to 20 hours: ACUVUE® OASYS, AIR OPTIX® AQUA, PureVision® 2 and Bausch + Lomb ULTRA®. 1. Opti-Free Express IFU. 2. Opti-Free Puremoist IFU. 3. Blink Revitalens IFU. 4. Bausch + Lomb data on file; 2020. Biocompatibility Assessment by Analysis of Graded Slit Lamp of ReNu Advanced Multi-Purpose Solution Subjects Over Three Months of Use. 5. Bausch + Lomb data on file; 2017. Results of stand alone testing procedure (ISO 14729) of renu(R) Advanced cleaning and disinfecting solution against the 5 panel organisms for disinfecting products. 6. Bausch + Lomb data on file; 2018. Results of an in home use test of ReNu® Advanced cleaning and disinfecting solution. 7. ReNu Advanced IFU. 8. International Standards Organization ISO 14729, 2001. Ophthalmic optics – Contact lens care products – Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses. 9. Bausch + Lomb data on file; 2016. High Resolution Accurate Mass-Selected Ion Monitoring/ Mass Spectrometry (HRAMSIMLC/MS) Determination of Poloxamer 181 Retention from Worn Lenses Soaked in ReNu® Advanced cleaning and disinfecting solution.

BAUSCH + LOMB

See better. Live better.

Starterkits et lentilles d'essai


Pour les starterkits, un pourcentage maximal de 6 % du nombre de flacons/packs facturés s'applique. Si aucune solution d'entretien n'est achetée, il n'est pas possible de commander des starterkits, sauf mention contraire. En cas de dépassement du pourcentage des starterkits, des frais peuvent être facturés.

Une politique d'utilisation équitable s'applique également à nos lentilles d'essai, voir le tableau ci-dessous.

Lentilles ULTRA® ONE DAY (5-pack)	15%
Lentilles ULTRA® ONE DAY Multifocal (5-pack)	20%
Lentilles ULTRA® for Astigmatism	15%
Lentilles ULTRA® for Presbyopia	20%
Lentilles ULTRA® Multifocal for Astigmatism	20%
ULTRA® Multifocal for Astigmatism LENTILLES DE CON-	20%
Lentilles Biotrue® ONEday (5-pack)	15%
Lentilles Biotrue® ONEday for Astigmatism (5-pack)	20%
Lentilles Biotrue® ONEday for Presbyopia (5-pack)	20%



Small

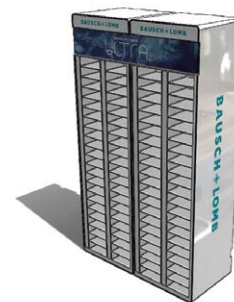

Medium

Instructions d'utilisation des lentilles de contact :



ifu.bausch.com

BAUSCH + LOMB

Découvrez

la Bausch + Lomb Academy of Vision Care: votre partenaire en matière de formations sur les soins oculaires

La Bausch + Lomb Academy of Vision Care est la ressource idéale pour les professionnels des soins de la vue qui souhaitent approfondir leurs connaissances et améliorer leurs compétences.

L'Academy a pour but d'informer les opticiens, les optométristes et les ophtalmologues des derniers développements en matière de lentilles de contact, d'équipements ophtalmiques et de santé oculaire. En collaborant avec des experts du monde entier, l'Academy of Vision Care promeut la qualité des soins et la satisfaction des clients.

En vous inscrivant, vous accédez à des articles intéressants, des rubriques inspirantes et des outils pratiques, tels que des instructions d'adaptation, les échelles de classement Efron et l'appli Fitbetter™ très pratique.


En plus du contenu écrit, l'Academy propose également des podcast "Table de Quatre" et des courts clips "Table de Quatre". Ces vidéos pratiques offrent un aperçu des dernières techniques et tendances en matière de soins oculaires. La plateforme propose des modules d'apprentissage en ligne, des webinaires et des informations actualisées qui vous permettront d'améliorer les soins prodigués à vos clients.

Ne manquez pas cette occasion de renforcer votre cabinet et d'approfondir vos connaissances.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la Bausch + Lomb Academy of Vision Care et restez au courant des dernières innovations en matière de soins oculaires !

Inscrivez-vous
maintenant :

www.academyofvisioncare.com/fr

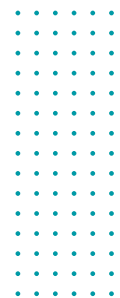



Biotrue® Solution multifonctions

FORMULE BIO-INSPIREE

Inspirée par la biologie de vos yeux - aucun compromis sur le confort et la désinfection.¹

pH équivalent à celui des larmes saines

Maintien de l'équilibre naturel.^{2,3}

Contient de l'acide hyaluronique (HA), une substance naturellement présente dans les yeux

Une meilleure hydratation grâce à l'acide hyaluronique (HA), une substance présente naturellement dans le corps humain et dans les yeux, qui retient l'hydratation jusqu'à 20 heures de port.^{4,5,6}

Gestion des protéines

Maintient actives les protéines lacrymales saines, neutralise et élimine les protéines lacrymales dénaturées.^{7,8}

Désinfection efficace et complète

Le double système de désinfection fonctionne avec des technologies bio-inspirées pour offrir un excellent niveau d'efficacité de désinfection.⁹

Type	Solution multifonctions
Principes actifs	Polyaminopropyl biguanide 0.00013%, polyquaternium 0.0001%
Autres ingrédients	Acide hyaluronique, sulfobétaïne, poloxamine, acide borique, borate de sodium, édétate de sodium et chlorure de sodium
Durée de désinfection minimale	4 heures ⁴

* Results of in vitro study performed to evaluate the release of hyaluronan from various traditional hydrogel (polymacon, alaphilcon A, etafilcon A) and silicone hydrogel lens materials (balafilcon A, senofilcon A, galyfilcon A, comfilcon A, and lotrafilcon B) over a 20-hour time period.



Biotrue® NOURISH

INSPIRÉE PAR LA BIOLOGIE DES YEUX - POUR UNE HYDRATATION ET UN CONFORT LONGUE DURÉE DE TOUTES LES LENTILLES DE CONTACT SOUPLES^{1,2,3,4}

Type	Gouttes ophtalmiques hydratantes pour LENTILLES DE CONTACT
Principes actifs	Oxyd® - Un conservateur doux qui, lorsqu'il est en contact avec la surface de l'œil se décompose en eau, oxygène et sels minéraux, composants naturels des larmes.
Autres ingrédients	0.15% acide hyaluronique, vitamine B12, 0.5% PEG 8000, électrolytes



1. Notice d'utilisation de Biotrue® Nourishing Contact Lens Hydrating Drops. 2. Leif Hynnekleiv et al., Hyaluronic acid in the treatment of dry eye disease. 2022. 3. Marc Labetoulle, Performance and Safety of a Sodium Hyaluronate Tear Substitute with Polyethylene Glycol in Dry Eye Disease: A Multicenter, Investigator-Masked, Randomized, Noninferiority Trial. 2022. 4. Ozen et al. Vitamin B12 deficiency evaluation and treatment in severe dry eye disease with neuropathic ocular pain. 2017 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28299439/>).

BAUSCH+LOMB

ReNu® ADVANCED Solution multifonctions

NETTOYAGE AVANCÉ

Combine trois désinfectants et deux tensioactifs pour une désinfection et un nettoyage excellents des lentilles et apporte du confort tout au long de la journée.^{10,11,12}

Triple système de désinfection

La seule solution multifonctions dotée d'un triple système de désinfection.^{12,13,14,15}
Élimine 99,9% des microbes.^{10,*}

Nettoyage avancé

Les deux tensioactifs nettoient, conditionnent et éliminent les résidus lacrymaux des lentilles de contact souples. En utilisation quotidienne, la solution aide à prévenir les dépôts sur les lentilles et dissout les protéines.^{12,16}

Confort tout la journée

Conditionne, hydrate et fournit 20 heures d'hydratation.^{17,**}



Type	Solution multifonctions
Principes actifs	Système de triple désinfectant - alexidine 0.0002%, polyquaternium 0.00015%, polyaminopropyl biguanide 0.00005%
Autres ingrédients	Poloxamine, poloxamer 181, diglycine, citrate de sodium, acide borique, borate de sodium, édétate disodique, chlorure de sodium
Durée de désinfection minimale	4 heures ¹²

† Against leading multi-purpose solutions. * Standardized Testing (ISO 14729) against S. Aureus, P. Aeruginosa, S. Marcescens, C. Albicans, F. Solani.

** P:181 retention measured across 4 leading silicone hydrogels when worn for up to 20 hours: ACUVUE® OASYS, AIR OPTIX® AQUA, PureVision®2 and Bausch + Lomb ULTRA®.

ReNu® MultiPlus Solution multifonctions

LE CONFORT DES LENTILLES FRAÎCHES

Nettoie, rafraîchit et désinfecte vos lentilles de contact, vous donnant l'impression d'utiliser une nouvelle paire chaque jour.¹⁸

Une sensation de lentilles fraîches

Offre le confort de lentilles fraîches tout au long de la journée.¹⁸

Déprotéinisant intégré

Élimine les accumulations de protéines, de biofilm, d'autres dépôts et de saletés lors d'une utilisation quotidienne.¹⁹

Nettoie et désinfecte efficacement.¹⁹

Type	Solution multifonctions
Principes actifs	DYMED™ (polyaminopropyl biguanide 0.0001%)
Autres ingrédients	HYDRANATE® (hydroxyalkylphosphonate) 0.03%, acide borique, édétate de sodium, poloxamine 1%, borate de sodium et chlorure de sodium
Durée de désinfection minimale	4 heures ¹⁹



BAUSCH+LOMB

ReNu[®] MPS Solution multifonctions

FAVORISE LE CONFORT DES YEUX SENSIBLES

Une formulation douce adaptée aux yeux sensibles.²⁰

Formulation douce pour les yeux sensibles²⁰

Nettoie, désinfecte et procure du confort^{21,22}



Type	Solution multifonctions
Principes actifs	DYMED [®] (polyaminopropyl biguanide) 0.00005%
Autres ingrédients	Acide borique, édétate de sodium, poloxamine 1%, borate de sodium et chlorure de sodium
Durée de désinfection minimale	4 heures ²¹

EasySept[®] Solution au peroxyde d'hydrogène

DURE POUR LES BACTÉRIES,
DOUCE POUR LES YEUX

Système de désinfection au peroxyde d'hydrogène,
sans conservateur, en une étape²³

Haut niveau de désinfection

La solution au peroxyde d'hydrogène à 3% agit comme un désinfectant sur les micro-organismes et dépasse les tests stand-alone FDA/ISO.^{23,24,25}

Élimination efficace des protéines^{23,26}

Convient aux yeux sensibles²³

Sans conservateurs²³

Type	Péroxyde d'hydrogène
Principes actifs	Péroxyde d'hydrogène 3%
Autres ingrédients	Acide phosphonique comme stabilisateur, chlorure de sodium et des tampons phosphates
Durée de trempage minimale	6 heures ²³



BAUSCH + LOMB

Boston® ADVANCE System

SYSTÈME DE NETTOYAGE ET DE CONDITIONNEMENT À DEUX ETAPES POUR LENTILLES RIGIDES

Boston® ADVANCE™ Cleaner

Boston® ADVANCE™ Cleaner est spécialement conçu pour le nettoyage des lentilles rigides perméables à l'oxygène.²⁷

ÉTAPE 1: Nettoyage

Élimine les dépôts de protéines et de lipides.²⁷

Formule visiblement teintée pour un meilleur nettoyage.²⁸



Type	Solution d'entretien pour lentilles rigides
Ingédients	<p>Principe actif : sulfate d'Alkyl tensioactif (8.0% w/w)</p> <p>Autres : chlorure de sodium, tampon phosphate, phospholipide tri-quaternaire à base de cacao, suspension de gel de silice, avec du dioxyde de titane²⁸</p>

Boston® ADVANCE System

SYSTÈME DE NETTOYAGE ET DE CONDITIONNEMENT À DEUX ETAPES POUR LENTILLES RIGIDES

Boston® Conditioning Solution

Boston® Conditioning Solution est spécialement conçue pour désinfecter et conditionner les lentilles rigides perméables à l'oxygène.^{29,30}

ÉTAPE 2 : Désinfection et confort

Contient un système de conservation efficace pour détruire les micro-organismes nocifs.²⁹

Système de confort

Le système de confort multipolymère adoucit la lentille et améliore l'hydratation tout au long de la journée.³⁰

Biocompatible avec les yeux³⁰

Type	Solution de conditionnement en deux flacons pour lentilles rigides
Principes actifs	Polyaminopropyl biguanide (0,0005%), gluconate de chlorhexidine (0,003%), édétate de disodium (0,05%)
Autres ingrédients	Sels et agents tampons, polyquaternium 10, viscosifère cellulosique, alcool polyvinylique, polyéthylène glycol dérivé
Durée de désinfection minimale	4 heures ³⁰



BAUSCH+LOMB

Bausch + Lomb Comfort Formula

SYSTÈME DE NETTOYAGE ET DE CONDITIONNEMENT À DEUX ETAPES POUR LENTILLES RIGIDES

Bausch + Lomb Concentrated Cleaner

Bausch + Lomb Concentrated Cleaner est spécialement conçu pour le nettoyage des lentilles rigides perméables à l'oxygène.²⁷

ÉTAPE 1: Nettoyage

Élimine les dépôts de protéines et de lipides.²⁷

Formule visiblement teintée pour un meilleur nettoyage.²⁸



Type	Solution d'entretien pour lentilles rigides
Principe actif	sulfate d'Alkyl tensioactif (8.0% w/w)
Ingédients	Autres : chlorure de sodium, tampon phosphate, phospholipide tri-quaternaire à base de cacao, suspension de gel de silice, avec du dioxyde de titane ²⁸

Bausch + Lomb Comfort Formula

SYSTÈME DE NETTOYAGE ET DE CONDITIONNEMENT À DEUX ETAPES POUR LENTILLES RIGIDES

Bausch + Lomb Conditioning Solution

Bausch + Lomb Conditioning Solution est spécialement conçue pour désinfecter et conditionner les lentilles rigides perméables à l'oxygène.^{29,30}

ÉTAPE 2 : Désinfection et confort

Contient un système de conservation efficace pour détruire les micro-organismes nocifs.²⁹

Système de confort

Le système de confort multipolymère adoucit la lentille et améliore l'hydratation tout au long de la journée.³⁰

Biocompatible avec les yeux³⁰

Type	Solution de conditionnement en deux étapes pour lentilles rigides
Principes actifs	Polyaminopropyl biguanide (0,0005%), gluconate de chlorhexidine (0,003%), édétate de disodium (0,05%)
Autres ingrédients	Sels et agents tampons, polyquaternium 10, viscosifère cellulosique, alcool polyvinylique, polyéthylène glycol dérivé
Durée de désinfection minimale	4 heures ³⁰



BAUSCH + LOMB

Boston® SIMPLUS®

L'EFFICACITÉ D'UN SYSTÈME EN DEUX ÉTAPES, EN UN SEUL FLACON

Boston® SIMPLUS® Multi Action Solution nettoie, désinfecte et conditionne les lentilles rigides perméables à l'oxygène.^{27,29,31}

Système en un flacon pour le nettoyage, la désinfection et le conditionnement des lentilles rigides perméables à l'oxygène^{27,29}

Élimination des lipides et des protéines

Avec éliminateur de protéines intégré pour l'élimination quotidienne des protéines et des lipides.²⁷

Désinfection efficace

Le système de conservation a démontré son efficacité à détruire les micro-organismes nocifs.²⁹

Effet apaisant pour les yeux

Contient un système de confort multi-polymère breveté qui apporte un revêtement protecteur sur la surface de la lentille. Adoucit la lentille lors de la pose et maintient et améliore l'hydratation de la lentille tout au long de la journée.³¹

Type	Solution multifonctions en un flacon pour lentilles rigides
Principes actifs	Gluconate de chlorhexidine (0.003%), polyaminopropyl biguanide (0.0005%)
Autres ingrédients	Poloxamine, hydroxyalkylphosphonate, acide borique, borate de sodium, chlorure de sodium, cellulose hydroxypropylmethyl, Glucam
Durée de désinfection minimale	4 heures ³¹



BAUSCH + LOMB

Bio
true[®]

inspired by the
biology of your eyes^{*}

Hydratation maximale^{1,2} Confort maximal



Inspirées par la biologie de l'œil
Hydratation maximale^{*}, confort maximal^{1,2}

16 heures
d'hydratation³



* Based on ACLM Year book, 2010. 1. ACLM Year book, 2010. 2. Bausch + Lomb, 2012. Results from a 21 Investigator, multi-site study of Bio true[®] ONEday lenses, with a total of 414 eligible subjects. After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Consumers rated Bio true[®] ONEday lens performance across a range of attributes and compared the performance to their habitual lenses. 3. Bausch + Lomb, 2012. Twenty-two subjects participated in a randomized, double-masked, contralateral eye study to evaluate water loss of Bio true[®] ONEday and 1-day ACUVUE[®] Moist contact lenses. After 4, 8, 12, and 16 hours of wear, lenses were removed and immediately weighed (wet weight). The lenses were then completely dried and reweighed (dry weight). The percent water loss was then calculated for each lens from the wet and dry weights. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien pour lentilles de contact Bausch + Lomb sont des dispositifs médicaux. CE 0050. 32445

BAUSCH + LOMB

Tableau de conversion de la puissance lunettes (ha = 12 mm) à la puissance lentilles

Puissances négatives

Puissance lunettes	Puissance lentilles	Puissance cylindre lunettes									
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00
-0,25	-0,25										
-0,50	-0,50										
-0,75	-0,75										
-1,00	-1,00										
-1,25	-1,25										
-1,50	-1,50										
-1,75	-1,75										
-2,00	-2,00										
-2,25	-2,25										
-2,50	-2,50										
-2,75	-2,75										
-3,00	-3,00										
-3,25	-3,25										
-3,50	-3,50										
-3,75	-3,75										
-4,00	-3,75										
-4,25	-4,00										
-4,50	-4,25										
-4,75	-4,50										
-5,00	-4,75										

Puissance lunettes	Puissance lentilles	Puissance cylindre lunettes									
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00
-5,25	-5,00										
-5,50	-5,00										
-5,75	-5,25										
-6,00	-5,50										
-6,25	-5,75										
-6,50	-6,00										
-6,75	-6,25										
-7,00	-6,50										
-7,25	-6,50										
-7,50	-6,50										
-7,75	-7,00										
-8,00	-7,00										
-8,25	-7,50										
-8,50	-7,50										
-8,75	-8,00										
-9,00	-8,00										
-9,50	-8,50										
-10,00	-9,00										
-10,25	-9,00										

Cylindre -0,75D
 Cylindre -2,25D
 Cylindre -1,25D
 Cylindre -2,75D
 Cylindre -1,75D

Puissances positives

Puissance lunettes	Puissance lentilles	Puissance cylindre lunettes						
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25
+0,25	+0,25							
+0,50	+0,50							
+0,75	+0,75							
+1,00	+1,00							
+1,25	+1,25							
+1,50	+1,50							
+1,75	+1,75							
+2,00	+2,00							
+2,25	+2,25							
+2,50	+2,50	Cyl. -0,75		Cyl. -1,25		Cyl. -1,75		Cyl. -2,25
+2,75	+2,75							
+3,00	+3,00							
+3,25	+3,25							
+3,50	+3,50							
+3,75	+4,00							
+4,00	+4,25							
+4,25	+4,50							
+4,50	+4,75							
+4,75	+5,00							
+5,00	+5,25							
+5,25	+5,50							
+5,50	+6,00							Cyl. -2,75



Utilisez l'application Bausch + Lomb FitBetter™


Pour la conversion la plus précise de la puissance des lentilles, nous recommandons l'application FitBetter™. Voir page 55 pour plus d'informations.

Directives d'adaptation pour lentilles de contact souples

Principes de base pour l'adaptation des lentilles de contact souples sur un œil normal

Lorsque nous réalisons la cartographie de la cornée, les paramètres suivants sont importants :

Diamètre de la cornée

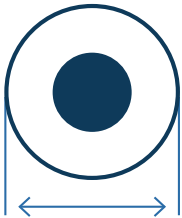

Courbures centrales et aplatissement périphérique
("shape factor" ou excentricité)



Hauteur sagittale



Le diamètre moyen de la cornée d'un œil normal est de 12,00 mm et son rayon moyen de 7,78 mm, avec un "shape factor" de 0,53 (valeur e 0.48¹). La hauteur sagittale moyenne de la cornée est de 3570 microns (sur la base d'un diamètre de 15,00 mm)¹.

BCR et hauteurs sagittales des lentilles de contact Bausch + Lomb

	BCR (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur sagittale*
Biotrue® ONE day	8.60	14.2	3700
Biotrue® ONE day for Astigmatism	8.40	14.5	4153
PureVision2	8.60	14.0	3627
PureVision2 for Astigmatism	8.90	14.5	3741
ULTRA®	8.50	14.2	3812
ULTRA® for Astigmatism	8.60	14.5	3969
ULTRA® ONE DAY	8.60	14.2	3756

La topographie cornéenne fournit les informations les plus fiables sur la forme de la cornée.

* mesurée en microns avec l'Optimec is830 - Pacific University - Oregon (USA) 2020© 2020 Bausch & Lomb Incorporated.



Guide d'adaptation pour lentilles de contact souples

Lentilles de contact sphériques Bausch + Lomb ULTRA®

Désormais également disponible en BCR 8,7 mm pour une plage d'adaptation plus large.

- Mettez à jour la réfraction lunettes et sélectionnez la puissance des lentilles de contact en fonction d'une réfraction lunettes récente. Pour les puissances $> +/- 4,00D$: convertissez la distance cornéenne à 0 mm (utilisez le tableau de conversion de la page 44 ou utilisez l'application FitBetter, voir page 55).
- **Commencez avec une BCR 8,50 comme premier choix.** S'il apparaît que la lentille n'est pas confortable, qu'elle procure une vision variable et/ou qu'elle ne permet pas ou peu de mouvement, choisissez une BCR de 8,70 mm, plus plate.

Évaluez l'adaptation des lentilles après 15 minutes.



Guide d'adaptation pour lentilles de contact souples multifocales*

Adaptation simple et prédictible en quatre étapes seulement

Étape 1

Mettez à jour la réfraction lunettes et l'addition lecture. Déterminez l'œil dominant à l'aide du test sensoriel de dominance oculaire en plaçant une lentille d'essai de +1,50D en alternance devant les yeux.

Étape 2

Sélectionnez la puissance correcte de la lentille. Pour les puissances $> +/ - 4,00D$, convertissez la distance cornéenne à 0 mm.
ASTUCE : utilisez l'application FitBetter™ pour une conversion rapide.

Étape 3

Sélectionnez des lentilles d'essai avec l'addition lecture correcte. Débutez toujours avec la même addition pour les deux yeux - 2x LOW ou 2x HIGH.

+0.75D	+1.00D	+1.25D	+1.50D	+1.75D	+2.00D	+2.25D	+2.50D
LOW ADD				HIGH ADD			

Étape 4

Évaluez l'adaptation de la lentille après 10 à 20 minutes. Lors de l'adaptation de la lentille Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism, il est également préférable d'évaluer la position du marqueur d'orientation.

Si nécessaire, optimisez la vision de loin ou de près (évaluez toujours de manière binoculaire et à la lumière ambiante).

Les étapes pour une optimisation fructueuse sont indiquées dans le tableau au verso.

*Ce guide d'adaptation est également valable pour l'adaptation de BiotrueONEday for Presbyopia et PureVision2 for Presbyopia.

Optimisation de la vision avec des lentilles multifocales*

B+L La conversion
FitBetter la plus précise:
Application
FitBetter™ page 55

Si le client porte

VISION DE PRÈS			VISION DE LOIN			
2 LOW ADDS	ŒIL DOMINANT	ŒIL NON DOMINANT	ŒIL DOMINANT	ŒIL NON DOMINANT		
	Première lentille :	LOW ADD	LOW ADD	Première lentille:	LOW ADD	LOW ADD
	Optimisation 1 :	LOW ADD	HIGH ADD	Optimisation 1 :	Bausch + Lomb ULTRA® LOW ADD Sphérique / for Astigmatism Bausch + Lomb Biotrue® Sphérique / for Astigmatism	
	Optimisation 2 : La vision de près est-elle encore insuffisante ? - Ajoutez à chaque fois +0,25D à l'œil non dominant (avec HIGH ADD) jusqu'à ce que la vision soit acceptable - Utilisez des verres d'adaptation ou un flipper à cette fin - Évaluez toujours en binoculaire et à la lumière ambiante		Optimisation 2 : La vision de loin est-elle encore insuffisante ? - Ajoutez -0,25D à l'œil dominant jusqu'à ce que la vision soit acceptable - Utilisez des verres d'adaptation ou un flipper à cette fin - Évaluez toujours en binoculaire et à la lumière ambiante			
	ŒIL DOMINANT	ŒIL NON DOMINANT	ŒIL DOMINANT	ŒIL NON DOMINANT		
	Première lentille :	HIGH ADD	HIGH ADD	Première lentille :	HIGH ADD	HIGH ADD
	Optimisation 1 :	HIGH ADD	HIGH ADD +0,25D	Optimisation 1 :	LOW ADD	HIGH ADD
	Optimisation 2 : La vision de près est-elle encore insuffisante ? - Ajoutez à chaque fois +0,25D à l'œil non dominant jusqu'à ce que la vision soit acceptable - Utilisez des verres d'adaptation ou un flipper à cette fin - Évaluez toujours en binoculaire et à la lumière ambiante		Optimisation 2 : La vision de loin est-elle encore insuffisante ? - Ajoutez -0,25D à l'œil dominant jusqu'à ce que la vision soit acceptable - Utilisez des verres d'adaptation ou un flipper à cette fin - Évaluez toujours en binoculaire et à la lumière ambiante			

2 HIGH ADDS

*Ce guide d'adaptation est également valable pour l'adaptation de BiotrueONEday for Presbyopia et PureVision2 for Presbyopia.

Paramètres lentilles multifocales



Disponible
à partir de
Mars 2026



	ULTRA® Multifocal for Astigmatism		ULTRA® for Presbyopia	ULTRA® ONE DAY Multifocal	Biotrue® ONEday for Presbyopia
Puissances :	+4.00D à -6.00D (par 0.25D)		+6.00D à -10.00D (par 0.25D)	+6.00D à -10.00D (par 0.25D)	+6.00 à -9.00D (par 0.25D)
Additions :	LOW: jusqu'à +1.50D HIGH: à partir de +1.75D		LOW: jusqu'à +1.50D HIGH: à partir de +1.75D	LOW: jusqu'à +1.50D HIGH: jusqu'à +2.50D	LOW: jusqu'à +1.50D HIGH: à partir de +1.75D
Cylindres :	-0,75D, -1,25D, -1,75D	-2,25D -2,75D			
Positions des axes :	10° à 180° (par 10°)	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°			
BCR / Diamètre :	8.60 / 14.5 mm		8.50 / 14.2 mm	8.60 / 14.2 mm	8.60 / 14.2 mm
Épaisseur centrale :	0.11 mm @ -3.00D		0.07 mm @ -3.00D	0,08 mm @ -3.00D	0.10 mm @ -3.00D
Dk/t :	104 @ -3.00D		163 @ -3.00D	134 @ -3.00D	42 @ -3.00D
Matériau :	Samfilcon A		Samfilcon A	Kalifilcon A	Nesofilcon A
Technologie :	MoistureSeal®		MoistureSeal®	Advanced MoistureSeal® + ComfortFeel	Hypergel™

BAUSCH + LOMB ULTRA® MULTIFOCAL FOR ASTIGMATISM

Les spécialistes en lentilles de contact considèrent que des **transitions fluides** à toutes les distances constituent le principal facteur de réussite pour le port de lentilles de contact toriques multifocales.⁶

TRANSITIONS FLUIDES ET EXCELLENTE VISION


La 3-Zone Progressive™ Design dispose de 3 profils de puissance distincts pour une excellente vision et des transitions fluides entre les zones de vision.

CONCEPTION ÉPROUVÉE DE LA LENTILLE

Comme la lentille Bausch + Lomb ULTRA® for Presbyopia, cette lentille incorpore des profils de puissance cohérents dans les zones de vision de près, intermédiaire et de loin. Ceci assure une distribution équilibrée de la quantité de lumière dans les différentes zones.⁷

LARGE ZONE INTERMÉDIAIRE

Avec une puissance cohérente pour les distances intermédiaires de plus en plus importantes.

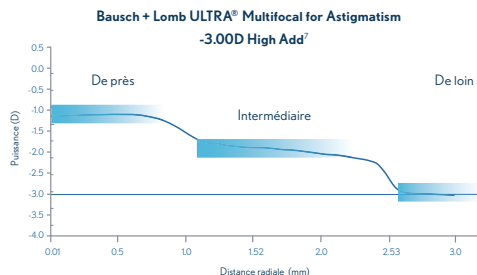

3 zones avec une puissance cohérente dans chaque zone. Profil de puissance de Nimo.

**6068
SKUs**
disponibles
en stock

APRÈS
16 HEURES
DE PORT, LA LENTILLE
CONTIENT ENCORE
95 %
D'EAU⁸

**16 HEURES DE
CONFORT**

grâce à la technologie

MoistureSeal®

pour une vision confortable
toute la journée⁵

Les adaptateurs déclarent : **une rotation minimale
est essentielle à la réussite de l'adaptation**
des lentilles de contact toriques multifocales.⁶

ADAPTATION STABLE

L'OpticAlign® Design dispose d'un ballast dans la moitié inférieure de la lentille pour minimiser sa rotation.
5° de rotation chez 95 % des porteurs.²

RÉSULTATS CLINIQUES^{2*}

Rotation, centrage et mouvement lors de l'adaptation

ROTATION		CENTRAGE		MOUVEMENT	
0 À 5 DEGRÉS	95 %	EXCELLENT	86 %	SUFFISANT	100 %
6 À 10 DEGRÉS	5 %	BON	14 %	EXCESSIF	0
11 À 15 DEGRÉS	0	MOYEN	0	INSUFFISANT	0
>16 DEGRÉS	0	MÉDIOCRE	0	AUCUN	0

* (n=42 yeux)

Professional Relations



Richard Backx

r.backx@bausch.com
+31 652 005 537



Tijl Van Mierlo

tijl.vanmierlo@bausch.com
+32 477 773 021

Marketing



Hana Fogl

hana.fogl@bausch.com
+31 652 005 582

Programme Recyclens


Le programme Recyclens collecte et recycle les matériaux résiduels des lentilles journalières Bausch + Lomb. Non seulement vous et vos clients contribuez à un monde meilleur, mais le programme vous apporte également des clients fidèles et des fans.

Toutes les lentilles journalières Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY et Biotrue® ONEday peuvent être jetées dans le bac de recyclage.

Inclus dans le programme Recyclens :


- Matériel promotionnel pour votre magasin et pour usage en ligne
- Inscription dans le localisateur de revendeur Recyclens
- Communiqué de presse local et soutien pour les réseaux sociaux

Comment fonctionne le programme Bausch + Lomb Recyclens ?

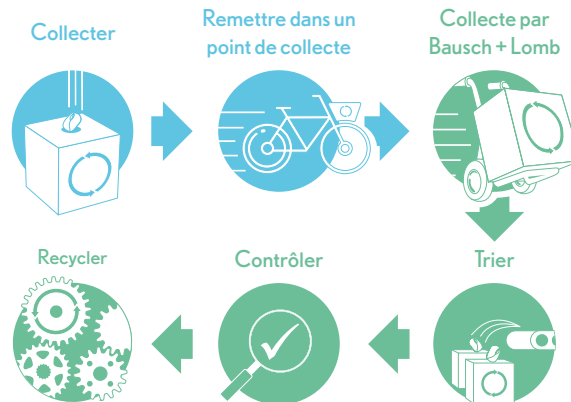

Application Bausch + Lomb FitBetter™



Nouvelle application de Bausch + Lomb pour une adaptation rapide et précise des lentilles de contact

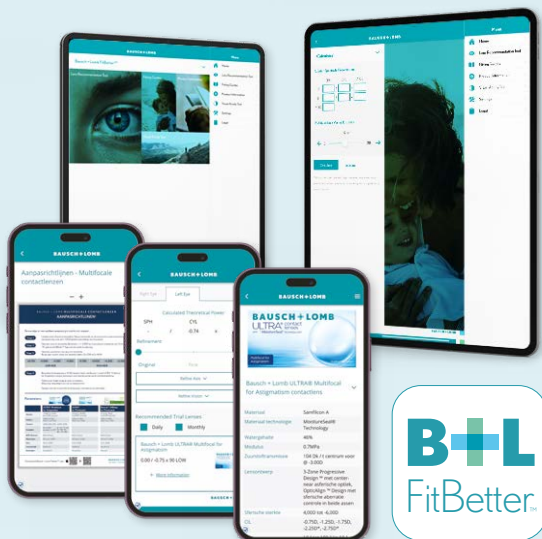

L'application Bausch + Lomb FitBetter™ assiste les spécialistes en lentilles de contact lors de l'adaptation des lentilles de contact. Non seulement l'application facilite le choix de la lentille adéquate, mais elle garantit également une adaptation plus précise. Après la saisie de la réfraction lunettes, la conversion vers une distance vertex de 0 mm, le calcul de la rotation de la lentille et le recalcul de la surréfraction se font en un clin d'œil. Le choix des lentilles est donc extrêmement facile et très approprié. Le calculateur de lentilles intégré propose automatiquement un choix de lentilles approprié, y compris leurs instructions d'adaptation.

Offrez à vos clients la solution idéale, rapidement et efficacement !

Utilisez Bausch + Lomb FitBetter™ pour votre ordinateur sur fitbetter.bausch.com ou téléchargez l'application pour votre tablette ou votre smartphone.

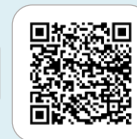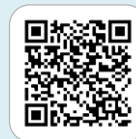

BAUSCH+LOMB

Commandes & facturation

Commander?

Via : **www.bauschdirect.com**

E-mail : **visioncare.benelux@bausch.com**

Tel. : **03 280 82 20**



A partir du 1er janvier 2026, vos factures via le réseau Peppol.

Dans le cadre de la législation sur la facturation électronique en Belgique, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les données suivantes :

Nom de l'entreprise / Numéro d'entreprise / Code client / ID PEPPOL.

Dès réception de ces informations, nous procéderons à l'activation du service et à l'envoi numérique de vos factures selon les normes en vigueur.

Demandez vos factures électroniques via:

visioncare.benelux@bausch.com

ou appelez le **+32 3 280 82 20**.



Contact

Service clientèle

Email : **visioncare.benelux@bausch.com**

Tel. : **03 280 82 20**

Horaire

Service clientèle

lundi - vendredi 9h00 - 17h00

Il est également possible de commander via:

www.bauschdirect.com

Conditions

Conditions générales

Scannez le code QR ci-dessous pour lire les conditions générales.



Frais d'expédition

Que ce soit pour les petites ou les grandes commandes, Bausch + Lomb ne facture pas de supplément pour les frais de manutention et de transport.

Nous vous avons conseillé de combiner les commandes autant que possible pour des raisons environnementales. Vous avez massivement répondu à cet appel, et nous vous en remercions. Ensemble, nous continuerons à essayer de minimiser les mouvements de transport.

Validité de ce tarif

Ce tarif est valable à partir du 1er janvier 2026. Ce tarif annule les anciens tarifs concernant les lentilles de contact et les solutions d'entretien. Tous les prix s'entendent hors TVA. Modifications des prix et de l'assortiment réservés.

Règles principales pour les retours et les crédits

1. Dans les 60 jours, demander un numéro de retour au Service clients.
2. Renvoyer avec bordereau de livraison (ou copie) mentionnant le numéro de lot.
3. Renvoyer dans l'emballage d'origine.
4. Les produits d'entretien ne peuvent pas être crédités.
5. Les produits d'entretien ne peuvent être échangés qu'en raison de dommages causés par le transport.
6. Toutes les lentilles rigides et souples peuvent être créditées, lorsqu'elles répondent aux règles principales. Pour les lentilles rigides, la période de retour est de 30 jours. Pour les autres lentilles, le délai est de 60 jours. Des frais de 5,00 EUR seront facturés pour le traitement.
7. Nous ne facturons aucun frais pour le renvoi des livraisons endommagées par le transport.
8. Attention pour les retours : les produits retournés qui ne respectent PAS les règles principales, ne seront pas crédités mais détruits.

Faites connaissance avec l'équipe de vente Bausch + Lomb

TERRITORY MANAGER PAYS-BAS - NORD - OUEST



Renate van den Braak
renate.van.den.braak@bausch.com
+31652 00 55 77

TERRITORY MANAGER PAYS-BAS - NORD - EST



Deborah Groeneveld
deborah.groeneveld@bausch.com
+31652 00 55 52

TERRITORY MANAGER PAYS-BAS - SUD - OUEST



Bas Steensma
bas.steensma@bausch.com
+31652 00 55 23



TERRITORY MANAGER
PAYS-BAS - SUD - EST



Kim van den Broek - Kwabek
kim.kwabek@bausch.com
+31652 00 55 83

TERRITORY MANAGER
BE - FLANDRE - OUEST



Hilde Van Damme
hilde.vandamme@bausch.com
+32 474 86 05 26

HEAD OF SALES BAUSCH + LOMB BENELUX



Paul Peters
paul.peters@bausch.com
+31652 00 55 61

TERRITORY MANAGER
BE - ANVERS - LIMBOURG - BRABANT FLAMAND



Jan Baptist Eyckmans
jan.eyckmans@bausch.com
+32 473 33 35 04

TERRITORY MANAGER
BE - BRUXELLES, WALLONIE & LUXEMBOURG



Sophie Gilain
sophie.gilain@bausch.com
+32 474 04 23 25

REGIONAL SALES MANAGER VISION CARE BELUX



Karim Jacqmain
karim.jacqmain@bausch.com
+32 478 44 26 73

BAUSCH+LOMB

Références

Lentilles de contact

1. Only Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contact lenses offer a complete moisture + comfort system with Advanced MoistureSeal® and ComfortFeel Technologies plus a complete design of high Dk/t, low modulus, UV blocking and High Definition™ Optics. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contact lenses deliver health through its complete system working together to support a healthy ocular environment, the inclusion of eye health ingredients which are retained over 16 hours and the high allowance of oxygen permeability (Dk/t=134).
2. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021.
3. Data on File. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes. Bausch + Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021.
4. VanDerMeid K, et al. Evaluation of erythritol and glycerin osmoprotection characteristics on an ocular surface cell line under hyperosmotic conditions. Poster presentation at the American Academy of Optometry Annual Meeting 2020.
5. Schafer, J. Steffen, R. Reindel, W. A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO, October 2020.
6. U.S. Food & Drug Administration 510(k) Summary K200528; Bausch + Lomb (kalifilcon A) Soft (hydrophilic) Contact Lens. May 2020.
7. Johnson & Johnson Acuvue® Oasys 1-Day with Hydraluxe™ Contact Lens Package Insert.
8. Alcon DAILIES TOTAL1® Contact Lens Package Insert.
9. The Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY Experience. March, 2021.
10. Johnson & Johnson Vision Explanation of contact lens properties and features <https://www.jnjvisioncare.co.uk/education/balance-of-properties/explanation-of-contact-lens-properties-and-features> (accessed 18/09/2020).
11. Alcon DAILIES TOTAL1® Contact Lens Parameters <https://professional.myalcon.com/contact-lenses/dailies-total-1/> (accessed 18/09/2020).
12. ACLN Year book. 2019.
13. Bausch + Lomb; 2012. Results from a 21 investigator, multi-site study of Biotrue® ONEday lenses, with a total of 414 eligible subjects (210 daily disposable lens wearers with 84 Focus Dailies Aqua Comfort and 33 1-Day ACUVUE Moist wearers, and 204 planned replacement lens wearers). After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Consumers rated Biotrue® ONEday lens performance across a range of attributes and compared the performance to their habitual lenses.
14. Bausch + Lomb; 2011. Hypergel Surface Characterisation Memo.
15. Bausch + Lomb; 2012. Twenty-two subjects participated in a randomized, double-masked, contralateral eye study to evaluate water loss of Biotrue® ONEday and 1-Day ACUVUE Moist contact lenses. After 4, 8, 12, and 16 hours of wear, lenses were removed and immediately weighed (wet weight). The lenses were then completely dried and reweighed (dry weight). The percent water loss was then calculated for each lens from the wet and dry weights.
16. Bausch + Lomb; 2020. Non-Invasive Tear Break-Up Time Evaluation of Six Unique Daily Disposable Lens Materials After 10 Hours of Wear. Global Specialty Lens Symposium.
17. Bergmanson J., Clinical Ocular Anatomy and Physiology. 14th ed. 2007.
18. Joseph D. Andrade, Hydrogels for Medical and Related Applications.
19. Barr, J., Donnelly, C., Rah, M.J. Measuring Oxygen Transmissibility: How Much is Enough for Healthy Contact Lens Wear?
20. Bausch + Lomb, Bausch + Lomb nesofilcon A contact lens (#510(k) Summary). 2012.
21. Bausch + Lomb; 2016. A study to evaluate product performance of two designs of soft toric lenses.
22. Bausch + Lomb; 2016. Biotrue® ONEday for Astigmatism (nesofilcon A Toric) Design Description.
23. Bausch + Lomb; 2016. Spherical Aberration Level Comparison of Competing Daily Disposable Toric Lenses Across the SKU Range.
24. Rah, Marjorie. OD PhD; Saxon, Jill. OD FAAO. Reindel, William, OD, MS; Drivers of Satisfaction with Daily Disposable Multifocal Contact Lenses. Poster Presented at AAO 2018.
25. Bausch + Lomb; 2011. A Study to Evaluate the Product Performance of Two Daily Disposable Contact Lenses.
26. Contact lens monthly; 2007. Enhancing contact lens design for complete performance.
27. Oliff H. S. and Egamino J.; 2008. A Study to Evaluate the Product Performance of a Prism-Ballasted Toric Contact Lens When Worn by Currently Adapted Soft Contact Lens Wearers.
28. Contact Lens Monthly; 2009. SofLens® daily disposable Toric for Astigmatism - heritage, design and performance.
29. Bausch + Lomb; 2017. A Study to Evaluate the Safety and Effectiveness of a Silicone Hydrogel Soft Contact Lens When Worn on a 7-Day Extended Wear Basis.
30. Bausch + Lomb; 2013. A study to evaluate the product performance of a new silicone hydrogel contact lens.
31. Reindel et al, Performance Of A Unique Silicone Hydrogel Lens Across The Recommended Wear Cycle Poster presented at AAO 2016.
32. Bausch + Lomb ULTRA® Contact Lenses with MoistureSeal® Technology; Taking Contact Lens Properties and Design to the Next Level for Best in Class Performance by Greg DeNaeye.
33. Results from a 7-investigator, multi-site 2-week study of Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism contact lenses on 157 current soft contact lens wearers. 2017.
34. Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism Design Description. December 2016.
35. Bausch + Lomb; 2013. Bench-top wavefront measurement comparison of ULTRA® SVS Lens to competitor SVS products.
36. Hovinga, K.R., 2016. Summary of ULTRA® for Astigmatism Orientation and Axis Markings.
37. Micromass; 2017. Bausch + Lomb ULTRA® Comfort Experience for Presbyopia Final Results Report.
38. Review of optometry, The Presbyopic Astigmatic, Capturing Patient Opportunity. 2019.
39. Millward Brown team; 2010. PureVision® 2.5 Product Test: First Time Wearers.
40. Bausch + Lomb Finished Product Specification, Cast Molded (Baltafilcon A) Contact Lenses. 2011.
41. AOCLCE Clinical Pocket Guide 2014.
42. A Study to Evaluate the Product Performance of Two Designs of Soft Toric Lenses. Rochester, NY. 2011.
43. A Study to Evaluate the Product Performance of an Investigational Multi-Focal Soft Contact Lens. Rochester, NY. 2013.
44. Data on file. Study to Evaluate the Product Performance of the Bausch + Lomb PureVision® Compared to the Currently Marketed Johnson & Johnson Acuvue® Oasys® Contact Lens When Worn on a Daily Wear Basis. Bausch + Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2007.
45. PureVision® Contact Lenses - Parameters and Specs <https://www.optix-now.com/bausch-lomb/purevision/549-overview.html>.
46. Bausch + Lomb, Data on file, 2005.
47. TechTalk; Multifocal Contact Lenses.
48. Kanouse J.J.; 2005. A Randomized, Multi-Center Comparison Study to Evaluate the Safety and Efficacy of the Investigational Maxsight Sport-Tinted Contact Lens Compared to the Currently Marketed Bausch + Lomb Optimatm 38 Contact Lens When Worn By Adapted Soft Contact Lens Wearers On A Daily Wear Basis. Rochester, NY.

Références

Solutions d'entretien pour lentilles de contact

1. ORC International, Biotrue® MPS 2018 IHUT. 2018.
2. Moses, R.A., Hart, W.M., Adler's; 1987. Physiology of the eye. Clinical Application.
3. Burke, S.E., Fridman, K.M., Scheuer, C.A., Barniak, V.L.; 2010. Physical properties of multipurpose contact lens care solutions.
4. Biotrue® MPS IFU.
5. Berry, M., Corfield A. P.; 1994. Evidence of hyaluronan in human tears and secretions of conjunctival cultures.
6. C.A. Scheuer *et al.*, 2010. Retention of conditioning agent hyaluronan on hydrogel contact lenses.
7. Barniak V.L., Burke S.E., Vernkatesh S.; 2010. Contact Lens & Anterior Eye publication: "Comparative evaluation of multi-purpose solutions in the stabilization of tear. lysozyme".
8. M. Jones, A. Ya'Ya, D. Heiler; 2016. Protein Removal Study with Biotrue Multi-Purpose Solution.
9. David B., Callahan D., McGrath D., Strassburg J., Hilfiker T and Tackabury J.; 2010. An evaluation of the rate of disinfection of various multi-purpose solutions and a hydrogen peroxide solution using the ISO 14729 Standard.
10. Bausch + Lomb data on file; 2017. Results of stand alone testing procedure (ISO 14729) of ReNu® Advanced cleaning and disinfecting solution against the 5 panel organisms for disinfecting products.
11. Bausch + Lomb data on file; 2018. Results of an in home use test of ReNu® Advanced cleaning and disinfecting solution.
12. ReNu® Advanced IFU.
13. Opti-Free® Express® IFU.
14. Opti-Free® Puremoist® IFU.
15. Blink Revitalens® IFU.
16. Bausch + Lomb data on file; 2020. Biocompatibility Assessment by Analysis of Graded Slit Lamp of ReNu® Advanced Multi-Purpose Solution Subjects Over Three Months of Use.
17. Bausch + Lomb data on file; 2016. High Resolution Accurate Mass-Selected Ion Monitoring/ Mass Spectrometry (HRAMS/MS) Determination of Poloxamer 181 Retention from Worn Lenses Soaked in ReNu® Advanced cleaning and disinfecting solution.
18. Bausch + Lomb data on file; 2008. Results from a 26-investigator multi-site 1-month study of ReNu® MultiPlus Multi-Purpose Solution on 153 habitual silicone hydrogel contact lens wearers.
19. ReNu® MultiPlus IFU.
20. ReNu® MPS carton.
21. ReNu® MPS IFU.
22. Bausch + Lomb data on file; 2007. Results from a 11-investigator multi-site 2-month study of ReNu® Multi-Purpose Solution on 129 habitual silicone hydrogel contact lens wearers.
23. EasySept® External Packaging.
24. ISO/FDA Stand Alone Procedure for Disinfecting Products of EasySept®.
25. International Standards Organization ISO 14729, 2001. Ophthalmic optics – Contact lens care products – Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses.
26. Susan J. Gromacki & Michael A. Ward; 2013. Understanding Contemporary Contact Lens Care Products. An overview of current contact lens systems, their components, and standards for care and cleaning.
27. ARVO 2013 Millard RGP Solution Cleaning Comparison.
28. Boston® ADVANCE™ Cleaner Solution Packaging.
29. ARVO 2013 RGP Solution disinfection Comparison.
30. Boston® Conditioning Solution IFU.
31. Boston® SIMPLUS® IFU.

© 2021 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ indiquent des marques commerciales de Bausch & Lomb Incorporated.

Les autres noms de produits/marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Bausch + Lomb Pharma SA Avenue du Haras 156, B-1150 Bruxelles, e-mail: visioncare.benelux@bausch.com

Les lentilles de contact et les solutions d'entretien pour lentilles de contact de Bausch + Lomb sont des dispositifs médicaux. CE 0050, CE 0483. 5158.

BAUSCH+LOMB

Abonnez-vous à notre **lettre d'information**

BAUSCH + LOMB

See better. Live better.

Cette lettre d'information vous tient au courant des derniers développements au sein de Bausch + Lomb.

Rendez-vous sur bauschlettredinformation.be ou scannez le code QR



Bausch + Lomb Academy of Vision Care:

votre partenaire en matière de formations sur les soins oculaires

Inscrivez-vous maintenant:

www.academyofvisioncare.com/fr



Passer une commande ?

Via www.bauschdirect.com

E-mail : visioncare.benelux@bausch.com

Tel. : 03 280 82 20



Restez informés !

Abonnez-vous à la lettre d'information de
Bausch + Lomb sur bauschlettredinformation.be



Bausch + Lomb Pharma SA Avenue du Haras 156, B-1150 Bruxelles, e-mail: visioncare.benelux@bausch.com

Les lentilles de contact et les solutions d'entretien pour lentilles de contact de Bausch + Lomb sont des dispositifs médicaux.

CE 0050, CE 0483. 5158.

BAUSCH + LOMB
See better. Live better.