

fr: Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement. Il est recommandé que les professionnels de la vue lisent ces informations avec leurs patients.

Lubrifie, nettoie, élimine les protéines, désinfecte, rince, conserve toutes les lentilles souples, y compris les lentilles en silicone hydrogel

Instructions

Pour nettoyer, éliminer les protéines, désinfecter et conserver les lentilles, suivez ces étapes simples :

ÉTAPE 1: déposez au moins 3 gouttes de solution multifonctions ReNu® Advanced sur chaque côté de la lentille et massez doucement pendant 20 secondes.

ÉTAPE 2: rincez soigneusement chaque côté de la lentille pendant 5 secondes avec la solution multifonctions ReNu® Advanced.

ÉTAPE 3: placez les lentilles de contact nettoyées dans l'étui à lentilles avec de la solution multifonctions ReNu® Advanced fraîche. Laissez tremper pendant au moins 4 heures. N'oubliez pas de toujours utiliser une solution fraîche.

Vos lentilles sont maintenant prêtes à être portées. Si des dépôts restent sur les lentilles de contact, rincez-les avec la solution multifonctions ReNu® Advanced avant de les mettre en place.

Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. En fonction de la composition de vos larmes et de vos habitudes de port des lentilles, votre spécialiste pourra recommander des produits ou des procédures supplémentaires. Si vous ne devez pas porter immédiatement vos lentilles, placez-les dans un étui à lentilles fermé.

Les lentilles peuvent être conservées dans l'étui fermé jusqu'à leur utilisation, pendant 30 jours maximum. Si vous conservez vos lentilles plus longtemps dans l'étui, elles doivent être nettoyées et désinfectées avec de la solution multifonctions ReNu® Advanced fraîche.

Composition:

Solution stérile, isotonique contenant de la poloxamine, du poloxamer 181, de la diglycine, du citrate de sodium, de l'acide borique, du borate de sodium, de l'édétate disodique et du chlorure de sodium et conservé avec un système de triple désinfectant (polyaminopropyl biguanide 0,00005%, polyquaternium 0,00015% et alexidine 0,0002%).

Actions:

Lorsqu'elle est utilisée quotidiennement, la solution multifonctions ReNu® Advanced dissout les protéines, moule, décolle et élimine débris et dépôts provenant des larmes qui s'accumulent sur les lentilles de contact souples. La solution multifonctions ReNu® Advanced aide à prévenir la formation de dépôts irritants à la surface des lentilles. Elle élimine les micro-organismes nocifs sur la lentille. La solution multifonctions ReNu® Advanced peut également être utilisée pour rincer les lentilles.

Avantages de la solution multifonctions ReNu® Advanced:

La solution multifonctions ReNu® Advanced est dotée d'un système unique de triple désinfection. La solution multifonctions ReNu® Advanced réhydrate les lentilles.

Utilisations (Utilisations):

La solution multifonctions ReNu® Advanced est indiquée pour une utilisation quotidienne - le nettoyage, l'élimination des dépôts de protéines, le rinçage, la désinfection chimique (non par la chaleur), la conservation et le stockage des lentilles de contact souples (hydrophiles), notamment les lentilles de contact en silicone hydrogel, comme recommandé par votre spécialiste.

Contre-indications (motifs de non-utilisation):

Il n'y a pas de contre-indications connues pour la solution multifonctions ReNu® Advanced. Toutefois, ne l'utilisez pas si vous êtes allergique à l'un des ingrédients de ce produit.

MISE EN GARDE: LES PROBLÈMES AVEC LES LENTILLES DE CONTACT ET LES PRODUITS D'ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT PEUVENT PROVOQUER UNE INFECTION ET/OU UN ULCÈRE DE LA CORNÉE ET ENTRAÎNER UNE PERTE DE LA VISION. Il est indispensable que vous suiviez les recommandations de votre professionnel de la vue et toutes les indications figurant sur l'étiquette et la notice pour une utilisation correcte des lentilles et de leurs produits d'entretien, y compris l'étui à lentilles.

Les problèmes oculaires, notamment les ulcères de la cornée, peuvent se développer rapidement et conduire à une perte de la vision. Les lentilles journalières ne sont pas indiquées pour être portées jusqu'au lendemain et ne doivent pas être portées pendant la nuit. Des études cliniques ont montré que le risque de réactions indésirables graves est augmenté lorsque ces lentilles sont portées jusqu'au lendemain. Les lentilles à port prolongé doivent être retirées régulièrement pour être nettoyées et désinfectées ou jetées et remplacées selon le programme prescrit par votre spécialiste.

Des études cliniques ont montré une augmentation de l'incidence des réactions indésirables graves chez les utilisateurs de lentilles de contact à port prolongé par rapport aux utilisateurs de lentilles de contact journalières. Des études ont également montré que le risque de réactions indésirables graves augmente avec la durée de port prolongée à port prolongé avant d'être retirées pour le nettoyage et la désinfection ou pour l'élimination et le remplacement. Des études ont également montré que les fumeurs ont une incidence plus élevée de réactions indésirables. Si vous présentez une gêne oculaire, un larmoiement excessif, des modifications visuelles, une rougeur de l'œil, retirez immédiatement vos lentilles et consultez rapidement votre spécialiste. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact de voir leur spécialiste deux fois par an, ou plus fréquemment si indiqué.

Tremper et stocker vos lentilles:

- Vous ne devez jamais remplir votre étui à lentilles avec de la solution fraîche chaque fois que vous y déposez vos lentilles. Ne jamais ajouter ou réutiliser la solution usagée. Vous devez jeter la solution immédiatement après avoir retiré vos lentilles de l'étui à lentilles. Maintenez les paupières supérieures et inférieures ouvertes avec vos doigts. Ensuite, en regardant dans un miroir, placez doucement un doigt sur la lentille de contact et faites glisser la lentille vers le centre de l'œil.
- Vous ne devez pas exposer, stocker vos lentilles ou rincer votre étui à lentilles avec de l'eau, qu'elle soit du robinet, en bouteille ou distillée ou avec une solution non stérile.

MISE EN GARDE:

- Le fait de ne pas jeter la solution de l'étui à lentilles après chaque utilisation, d'ajouter de la solution ou d'utiliser de l'eau pour l'entretien de vos lentilles peut causer une contamination entraînant des lésions oculaires et une perte potentielle de la vision.
- Massez vos lentilles pendant 20 secondes en utilisant au moins 3 gouttes de solution sur chaque côté de la surface des lentilles.

Durée de massage et de rinçage :

- Mettez vos lentilles pendant 20 secondes en utilisant au moins 3 gouttes de solution sur chaque côté de la surface des lentilles.
- Rincez chaque côté de la lentille pendant 5 secondes avec la solution.

MISE EN GARDE :

- Vous devez respecter l'intégralité des durées de massage et de rinçage recommandées dans l'étiquetage du produit pour désinfecter correctement vos lentilles et réduire le risque de contamination des lentilles de contact. Une durée réduite de massage ou de rinçage peut ne pas nettoyer correctement vos lentilles.
- Ne jamais utiliser d'eau, de solution saline ou de collire de réhydratation pour désinfecter vos lentilles. Ces solutions ne désinfecteront pas vos lentilles. Ne pas utiliser le désinfectant recommandé peut provoquer une infection grave, une perte de vision ou une cécité.

Entretien de l'étui à lentilles:

- Avant la première utilisation, rincez soigneusement l'étui à lentilles et les couvercles avec une solution désinfectante pour lentilles de contact.
- Nettoyez, rincez et séchez votre étui à lentilles à l'air libre chaque fois que vous retirez vos lentilles. Pour permettre l'écoulement de l'excès de solution vous pouvez retourner votre étui à lentilles pendant le séchage à l'air libre.
- Remplacez souvent votre étui à lentilles, au minimum tous les trois mois.

MISE EN GARDE:

- Ne conservez pas vos lentilles ou ne rincez pas votre étui à lentilles avec de l'eau ou avec une quelconque solution non stérile. Utilisez uniquement de la solution multifonctions fraîche de manière à ne pas contaminer vos lentilles ou votre étui à lentilles. L'utilisation d'une solution non stérile peut provoquer une infection grave, une perte de vision ou une cécité.

Activités aquatiques:

- N'exposez pas vos lentilles de contact à l'eau pendant que vous les portez.
- Demandez à votre spécialiste des recommandations sur le port de vos lentilles pendant les activités aquatiques.

Date de péremption:

- Jetez toute solution restante 90 jours après l'ouverture du flacon.

MISE EN GARDE:

- La contamination de votre solution multifonctions au-delà de la date de péremption pourrait provoquer une contamination de la solution et peut entraîner une infection grave, une perte de la vision ou une cécité.

Informations importantes relatives à la sécurité :

- Respectez toujours les instructions d'utilisation du produit. Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner une perte de vision.
- Consultez régulièrement votre spécialiste.
- Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de manipuler les lentilles.
- N'utilisez pas d'eau du robinet, en bouteille ou de saline avec les lentilles ou l'étui à lentilles.
- Ne pas utiliser si le sceau d'imviolabilité du flacon est détérioré ou manquant.
- Utilisez uniquement de la solution fraîche pour nettoyer et désinfecter les lentilles de contact.
- Jetez systématiquement toute solution restante dans votre étui à lentilles après chaque cycle de désinfection.
- Une solution saline ou des gouttes de réhydratation ne désinfecteront pas vos lentilles.
- Remplacez toujours vos solutions, lentilles et étuis à lentilles comme indiqué.
- Pour prévenir une contamination, évitez tout contact de la pointe du flacon avec une surface. Remplacez le capuchon après utilisation.
- Non prévu pour la désinfection par la chaleur (thermique).

Précautions d'emploi:

- Jetez toujours la solution de l'étui à lentilles après chaque utilisation.
- Gardez le flacon hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez la solution à température ambiante. Ne pas congeler.
- À utiliser avant la date de péremption figurant sur le carton et le flacon.
- Jetez toute solution restante 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Tenir hors de portée des enfants.

Réactions indésirables (problèmes et conduite à tenir) : Les problèmes suivants peuvent survenir : picotements oculaires, brûlures ou démangeaisons (irritations), le confort est moindre que lorsque la lentille a été placée pour la première fois sur les yeux, sensation de présence dans l'œil (corps étranger, zone éraflée), humidification excessive de l'œil (larmoiement), sécrétions oculaires inhabituelles, œil rouge, acuité visuelle réduite (faible acuité visuelle), vision trouble, arcs-en-ciel ou halos autour des objets, sensibilité à la lumière (photophobie), ou sécheresse oculaire. Si vous remarquez un des effets ci-dessus :

Retirez immédiatement vos lentilles.

- Si la gêne ou le problème disparaît, examinez attentivement la lentille.
- Si la lentille présente un défaut quelconque, ne la remettez pas sur votre œil. Placez la lentille dans l'étui à lentilles et consultez votre spécialiste.
- Si une poussière ou un cil ou un autre corps étranger est présent sur la lentille, ou si le problème cesse et que la lentille ne semble pas endommagée, nettoyez, rincez et désinfectez soigneusement la lentille, puis remettez-la en place.

Si le problème persiste, retirez immédiatement la lentille et consultez votre spécialiste.

Si l'un des symptômes ci-dessus apparaît, ce peut être le signe d'une affection sérieuse telle qu'une infection, un œdème cornéen, une néovascularisation ou une iritis. Recherchez immédiatement une identification du problème par un professionnel et un traitement rapide pour éviter des lésions oculaires graves.

Lorsque vous consultez votre spécialiste pour l'évaluation d'une infection potentielle de l'œil, apportez vos lentilles, vos solutions et votre étui à lentilles à votre rendez-vous pour permettre une éventuelle mise en culture et mieux cibler l'identification et le traitement d'organismes.

Bonne hygiène d'entretien des lentilles :

- Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles.
- Nettoyez, rincez et désinfectez vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
- Manipulez toujours la même lentille en premier, la droite ou la gauche, pour éviter les refluxs.
- Après l'utilisation, videz et rincez toujours l'étui à lentilles avec la solution multifonctions ReNu® Advanced, laissez-le sécher à l'air libre. Gardez le flacon hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conditionnements : la solution multifonctions ReNu® Advanced est commercialisée en flacons en plastique stériles. Les flacons et les cartons portent un numéro de lot et une date de péremption.

*/** sont des marques déposées de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

©2020 ©Bausch & Lomb Inc.

Date de péremption: 2020-07

nl: Lees deze bijluiter zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Het wordt aanbevolen dat alle contactlensspecialisten deze informatie doornemen met hun patiënten.

Verzorgen, reinigen, verwijderen van proteïne, desinfecteren, afspoelen, bewaren van alle zachte contactlenzen inclusief silicone hydrogel lenzen

Gebruiksaanwijzing:

Volg deze eenvoudige stappen om uw lenzen te verzorgen, reinigen, proteïne te verwijderen en te desinfecteren: **STAP 1:** Breng minstens 3 druppels ReNu® Advanced multi-purpose solution aan op elke kant van de lens en wrijf de lens gedurende 20 seconden voorzichtig schoon.

STAP 2: Spoel elke kant van de lens grondig gedurende 5 seconden af met ReNu® Advanced multi-purpose solution.

STAP 3: Plaats de gereinigde contactlenzen in de lenshouder en vul deze met verse ReNu® Advanced multi-purpose solution. Laat de lenzen tenminste 4 uur in de vloeistof staan. Zorg dat u altijd verse lensvloeistof gebruikt.

Uw contactlenzen zijn nu klaar voor gebruik. Als er nog vuil op de contactlenzen zit, spoel ze dan af met ReNu® Advanced multi-purpose solution voordat u de lenzen inzet.

Volg altijd het advies van uw contactlensspecialist. Op basis van de samenstelling van uw traanvocht en de samenstelling van uw contactlensvloeistof, kan uw contactlensspecialist aanvullende producten of procedures aanbevelen. Als u uw contactlenzen niet onmiddellijk inbrengt, bewaar ze ze in een afgesloten lenshouder.

U kunt uw lenzen maximaal 30 dagen in een afgesloten lenshouder bewaren. Indien u uw lenzen voor langere tijd wilt bewaren, moet u ze voor gebruik opnieuw reinigen en desinfecteren met verse ReNu® Advanced multi-purpose solution.

Inhoud:

Een steriele, isotone vloeistof die poloxamine, poloxamer 181, diglycine, natriumcitraat, boorzuur, natriumborataat, dinatriummetaat en natriumchloride bevat; geconserveerd met een driedvoudig desinfectiesysteem (polyaminopropyl biguanide 0,00005%, polyquaternium 0,00015% en alexidine 0,0002%).

Werking:

Dagelijks gebruik van ReNu® Advanced multi-purpose solution reinigt en verwijdert ophoping van vet, proteïne en andere aanslag en vuil van zachte contactlenzen. ReNu® Advanced multi-purpose solution helpt de vorming van irriterende aanslag op het lensoppervlak te voorkomen. Het doodt schadelijke micro-organismen op de lens. ReNu® Advanced multi-purpose solution kan ook worden gebruikt om lenzen af te spoelen.

Voordelen van ReNu® Advanced multi-purpose solution:

ReNu® Advanced multi-purpose solution bevat een uniek driedvoudig desinfectiesysteem. ReNu® Advanced multi-purpose solution bevat vochtigt lenzen opnieuw.

Indicaties (voor gebruik):

ReNu® Advanced multi-purpose solution is geïndiceerd voor dagelijkse verzorging, reiniging, het verwijderen van proteïne aanslag, afspoelen, chemische (niet thermische) desinfectie en het bewaren van zachte (hydrofiele) contactlenzen, inclusief silicone hydrogel contactlenzen, zoals aanbevolen door uw contactlensspecialist.

Contra-indicaties (redenen om niet te gebruiken):

Er zijn geen gekende contra-indicaties voor het gebruik van ReNu® Advanced multi-purpose solution. Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen in het product, dit product niet gebruiken.

WAARSCHUWING: PROBLEEMEN MET CONTACTLENZEN EN LENSVERZORGINGSPRODUCTEN KUNNEN LEIDEN TOT OOGINFECTIES VAN EN/OF BESCHADIGING VAN HET HOORVLIES EN ZELFS TOT HET VERLIES VAN HET GEZICHTSVERMAGEN. Het is essentieel dat u de instructies over de verzorging van uw contactlenzen en contactlensproducten, inclusief lenshouder, door uw contactlensspecialist en op de bijluiter en verpakking nauwkeurig opvolgt.

Oogaandoeningen, inclusief hoornvliesontsteking, kunnen zich snel ontwikkelen en kunnen tot verlies van het gezichtsvermogen leiden. Lenzen die zijn ontwikkeld om overdag te dragen, mogen niet worden ingehouden tijdens het slapen. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de kans op negatieve bijwerkingen toeneemt wanneer deze lenzen 's nachts worden ingehouden. Lenzen die geschikt zijn om dag en nacht te dragen, moeten regelmatig worden uitgenomen om te reinigen en te desinfecteren, of om te worden vervangen volgens het vervangingsmaatschaps voorgeschreven door uw contactlensspecialist. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat negatieve bijwerkingen vaker voorkomen bij dragers van lenzen die dag en nacht (tijdens het slapen) worden ingehouden ten opzichte van dragers van lenzen die alleen overdag worden gedragen. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat de kans op negatieve bijwerkingen toeneemt naarmate lenzen langer worden ingehouden. Het is belangrijk dat u de instructies van de fabrikant van de lenzen nauwkeurig opvolgt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat rokers vaker last hebben van negatieve bijwerkingen. Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, of indien uw gezichtsvermogen verslechtert, of indien u roodheid van het oog ervaart, verwijder dan onmiddellijk uw lenzen en neem onmiddellijk contact op met uw contactlensspecialist. Dragere van contactlenzen wordt aangeraden om minimaal twee keer per jaar of vaker (indien voorgeschreven) hun contactlensspecialist te bezoeken.

Spoelen en bewaren van uw lenzen:

- Iedere keer dat u uw lenzen in de lenshouder bewaart, moet u deze vullen met verse contactlensvloeistof: vul nooit de vloeistof bij! of hergebruik de oude vloeistof nooit. U moet de oude vloeistof direct weggoeden nadat u uw lenzen uit de lenshouder heeft gehaald.
- U mag uw lenzen nooit behandelen met water of bewaren in een lenshouder die is omgespoeld met water, zij het kraanwater, flessenwater of gedistilleerd water of een andere niet-steriele vloeistof.

WAARSCHUWING:

- Indien u nalaat de vloeistof na ieder gebruik uit de lenshouder weg te gooien, contactlensvloeistof blijft of water gebruikt bij de verzorging van uw lenzen, kan dit leiden tot contaminatie, wat kan leiden tot ooginfecties en mogelijk verlies van het gezichtsvermogen.

Tijdsduur om uw lenzen schoon te wrijven en af te spoelen:

- Breng minstens 3 druppels oplossing aan op elke kant van de lens en wrijf uw lenzen gedurende 20 seconden voorzichtig schoon.
- Spoel vervolgens elke kant van de lens gedurende 5 seconden met de oplossing af.

WAARSCHUWING:

- U dient de af de bijluiter en verpakking aanbevelen duur om uw lenzen schoon te wrijven en af te spoelen

