



Bausch + Lomb Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO®

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET LA CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

Inspirée par vos yeux

Cher utilisateur,

Merci d'avoir choisi Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ! C'est le produit idéal pour calmer et hydrater instantanément vos yeux en cas de sécheresse oculaire due à des facteurs environnementaux. Il apaise et rafraîchit naturellement les yeux secs, et soulage les symptômes liés à la fatigue et l'irritation oculaires, et même le larmoiement. Grâce à son système multidose innovant et sans conservateur, Biotrue® Gouttes ophtalmiques MDO® vous apporte tous les avantages d'une solution sans conservateur dans un flacon multidose. Une fraîcheur naturelle qui apporte une hydratation instantanée aux yeux soumis à un environnement difficile.

- Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® se présente sous la forme d'une solution transparente pour instillation en gouttes oculaires
- Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ne contient pas de conservateur
- Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® peut être utilisé 6 mois après ouverture
- Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® contient de l'acide hyaluronique, un polymère naturel (sous la forme de hyaluronate de sodium) présent dans les structures de l'oeil et le film lacrymal.
- Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® peut être utilisé pour humidifier et réhumidifier les lentilles de contact souples et rigides sans les enlever, et améliorer ainsi notablement le confort de port des lentilles, tout au long de la journée.
- Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® est bien toléré, facile à utiliser et sûr d'emploi.

Veillez lire attentivement les présentes instructions car elles contiennent d'importantes informations sur l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à votre opticien

Bausch + Lomb se préoccupe de la santé de vos yeux.



COMPOSITION :

La solution contient 0,24% d'acide hyaluronique (sous la forme de hyaluronate de sodium) et des excipients notamment eau stérile, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique dodécahydraté et sodium dihydrogénophosphate dihydraté. Elle ne contient pas de conservateur.

PRÉSENTATION :

Biotrue® Gouttes ophtalmiques MDO® est disponible en flacons de 10 ml.

USAGE PRÉVU DE BIOTRUE® GOUTTES OPHTALMIQUES LUBRIFIANTES MDO®:

Lubrification oculaire et pour humidifier et réhumidifier les lentilles de contact souples et rigides sans les enlever. Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® est spécialement conçu pour rafraîchir et hydrater en cas de sécheresse oculaire due à des facteurs environnementaux. Ces facteurs sont souvent liés au mode de vie ou à l'environnement extérieur, par exemple l'usage intensif d'un ordinateur, le travail en environnement confiné, le manque de clignement des paupières, la fumée de tabac ou l'exposition au vent. Par ailleurs, certains médicaments (notamment la pilule contraceptive, les antihistaminiques, les bêtabloquants, les antispasmodiques et les diurétiques), certaines maladies ou certains conservateurs présents dans certaines gouttes ophtalmiques peuvent contribuer à l'apparition d'une sécheresse oculaire. Biotrue® Gouttes ophtalmiques MDO® hydrate et soulage les principaux symptômes de la sécheresse oculaire, notamment la sensation de sécheresse, l'irritation ou la fatigue oculaire, la sensation de corps étranger ou le larmoiement excessif. Compte tenu des propriétés de ce produit, les patients souffrant d'une sécheresse oculaire chronique peuvent également bénéficier de son utilisation.

À quelle fréquence devez-vous utiliser Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ?

Instillez une goutte dans l'oeil dès que le besoin s'en fait sentir. Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ne contenant aucun conservateur, vous pouvez l'utiliser tous les jours, aussi souvent que vous le souhaitez.

Informations importantes sur l'utilisation de Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO®

Dans de rares cas, ce produit peut provoquer des réactions d'hypersensibilité telles des réactions allergiques locales. Si c'est le cas, arrêtez le traitement.

N'utilisez pas ce produit si vous présentez une hypersensibilité à l'un des ingrédients.


Informations de sécurité destinées aux patients souffrant de lésions sévères de la cornée : Dans de très rares cas, des dépôts de phosphate de calcium ont été observés sur la cornée dans le cadre d'un traitement par des produits ophtalmiques contenant du phosphate.

Afin d'améliorer la tolérance du produit, Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ne contient pas de conservateurs. Le mécanisme de flacon pompe vous permet d'utiliser Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® pendant 24 semaines (6 mois) après ouverture du flacon. Ne pas utiliser Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® après la date de péremption. Ne pas utiliser si le flacon est endommagé. Remarque : lors de la première utilisation, ou après une période de non-utilisation prolongée, il est nécessaire d'amorcer la pompe. Lorsque vous pompez la solution, vous devez tenir le flacon en orientant l'embout vers le bas.

COMMENT UTILISER BIOTRUE® GOUTTES OPHTALMIQUES LUBRIFIANTES MDO® :

La pompe au mécanisme breveté permet de ne pas utiliser de conservateurs dans la solution mais elle peut différer quelque peu des flacons de gouttes que vous avez peut-être utilisés dans le passé.

Les illustrations ci-après vous montrent comment utiliser facilement et simplement Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO®.

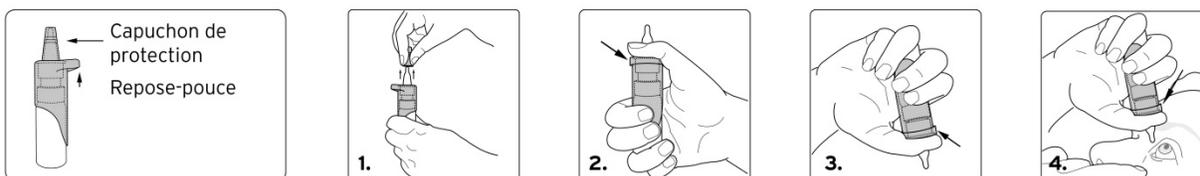

1. Retirez le capuchon de protection de l'embout du flacon avant chaque utilisation. Assurez-vous de ne pas toucher l'embout du flacon avec vos doigts.



2. Placez votre pouce sur le repose-pouce ergonomique et deux autres doigts sur le fond du flacon.
3. Retournez le flacon et tenez-le comme indiqué. Avant la première utilisation de la pompe, vous devez l'amorcer. Pour cela, appuyez sur le repose-pouce environ 7 fois, jusqu'à voir apparaître la première goutte.
4. Pour instiller la goutte, penchez légèrement votre tête en arrière et tenez le flacon dans la position qui vous convient le mieux au-dessus de votre oeil. Tirez délicatement vers le bas votre paupière inférieure avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon à la verticale et appuyez doucement sur le repose-pouce pour déposer une goutte dans l'oeil. Fermez votre oeil et faites-le bouger lentement dans tous les sens pour étaler la goutte à la surface de l'oeil. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre autre main pour assurer le positionnement ou la précision de l'instillation.
5. Évitez de mettre le flacon en contact avec vos yeux ou vos doigts afin de limiter la contamination de la solution.
6. Remettez en place le capuchon de protection sur l'embout du flacon immédiatement après chaque utilisation.



Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Germany

Distributore:
Bausch+Lomb OPS B.V.
Postbus 75774
1118 ZX Luchthaven Schiphol
Nederland



Conserver le produit à une température comprise entre +1 °C et +25 °C.



Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.



Date de péremption



Suivre les instructions d'utilisation !



Jeter le dispositif medical 6 mois après l'ouverture du flacon.



Numéro de lot



Méthode de stérilisation, aseptique

®/™ sont des marques commerciales de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated